

# Surgical Dressing

Антисептическая и местноанальгезирующая повязка для стоматологического применения.

## Состав

Гваякол 12,2 %, бензокаин 8,2 %, хлорбутанола гемигидрат 5,1 %, ментол 5 %, тимола иодид 4,1 %, метилсалицилат 1,8 %, вспомогательные вещества до 100 %.

## Описание

Surgical dressing — гелеобразная масса для снижения болезненности и антисептической обработки слизистой оболочки полости рта после операционных вмешательств. Нанесение препарата способствует практически моментальному устранению болезненных ощущений. Эффект сохраняется до полного растворения препарата.

## Показания

- ▶ Боли в области лунокудаленных зубов и операционных вмешательств в полости рта
- ▶ Обезболивание как во время, так и после пародонтальных вмешательств
- ▶ Сухие лунки удаленных зубов
- ▶ Болезненные, инфицированные повреждения слизистой оболочки полости рта

## Способ применения

Нанести необходимое количество препарата на поврежденную слизистую оболочку. При необходимости повторять аппликации в течение 7 дней.

## Меры предосторожности

Не применять препарат у пациентов, страдающих аллергией на этиламинобензоат (бензокаин) или другие компоненты препарата.

В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу.

В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу.

В случае проглатывания промыть рот водой и обратиться к врачу.

Обеспечьте покой пациенту, проглотившему препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.

В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала.

## Хранение

Хранить при комнатной температуре 5-30°C, в сухом, защищенном от прямого света месте.

**Срок хранения** 5 года.

## Упаковка

туба 25 г

АПТ

11630

только для профессионального применения в стоматологии. сделано в швейцарии.



**Produits Dentaires SA**  
Rue des Bosquets 18  
1800 Vevey . Switzerland

www.pdsa.ch  
© PD 140210