

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала для временных пломб
"Дентин-паста"
по ТУ 9391-005-45814830-2003

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал для временных пломб "Дентин-паста" (далее по тексту – материал "Дентин-паста") предназначен для временного пломбирования полостей на период 1-2 недели, для временной изоляции лекарственного средства в кариозной полости, а также в качестве подкладки под пломбы из амальгам.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал "Дентин-паста" является цинк-сульфатным цементом на полимерной основе и представляет собой готовую к применению однородную пасту. Материал "Дентин-паста" отверждается под воздействием влаги полости рта в течение 2-3-х часов, в процессе затвердевания материал расширяется, обеспечивая плотное краевое прилегание. Материал "Дентин-паста" обладает высокой устойчивостью к нагрузкам и превосходной адгезией к твердым тканям зуба, не вызывает раздражения тканей полости рта.

Материал "Дентин-паста" выпускается белого или розового цвета с различными отдушками (гвоздика, мята, цитрон, клубника, вишня, лимон) и без отдушки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Перед пломбированием полость зуба необходимо увлажнить. Шпателем отобрать необходимое количество материала "Дентин-паста", соответствующее размеру пломбируемой полости, и поместить на стеклянную пластину или на лист блокнота для замешивания. ***Сразу герметично закрыть банку с пастой для предотвращения поверхностного твердения материала!*** Необходимое количество материала внести в полость зуба и провести конденсацию пасты штопфером.

ВНИМАНИЕ: *Оставшийся на стеклянной пластине пломбировочный материал запрещается помещать обратно в банку с материалом «Дентин-паста».*

Поверхностное твердение материала начинается в течение 20-30 минут. Через 2-3 часа временная пломба способна выдержать жевательные нагрузки (пациенту не рекомендуется принимать пищу до истечения этого времени).

Материал "Дентин-паста" легко удаляется из полости крупными фрагментами с помощью экскаватора или зонда. Остаток материала вымывается из полости водой.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (банка)	- 50 г
Инструкция по применению	- 1 шт.

Картонная упаковка

- 1 шт.

Допускается выпуск материала "Дентин-паста" другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом месте (относительная влажность < 50%) в плотно закрытой таре при температуре **от +5°C до +25°C**.

Срок годности - **2 года**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°C до +30°C**.

ВНИМАНИЕ:

Избегать попадания влаги, прямых солнечных лучей и непосредственной близости нагревательных приборов!

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.