

ДИПЛЕН-ДЕНТА Х

Пленка полимерная стоматологическая самоклеящаяся двухслойная с хлоргексидином

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02392,
выдано ООО «Норд-Ост», Москва. РФ.

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

1 кв. см пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА Х толщиной 0,02-0,06 мм содержит хлоргексидина биглюконат 0,01-0,03 мг.

СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ

ДИПЛЕН-ДЕНТА Х - двухслойная пленка, состоящая из совмещенных гидрофильного и гидрофобного слоев. Предназначена для местного применения. Обладает ярко выраженным антисептическим действием, обусловленным наличием в составе пленки хлоргексидина биглюконата.

ДИПЛЕН-ДЕНТА Х гидрофильной (клеящей) стороной плотно фиксируется на влажной слизистой, раневой, ожоговой и др. поверхностях и сохраняется в течение нескольких часов. Пораженный участок герметично изолируется от окружающей среды, исключается вторичное инфицирование раны, осуществляется активное и избирательное воздействие лечебного фактора на место поражения. Пленка прозрачна, что позволяет наблюдать за течением процесса, не снимая ее. Наружный (гидрофобный) слой предотвращает выход компонентов пленки в полость рта, предохраняет от попадания компонентов ротовой жидкости в зону действия пленки, а также позволяет больным в период лечения соблюдать гигиену полости рта.

Применение пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА Х при лечении различных инфекционных и воспалительных заболеваний полости рта и десен, послеоперационных ран, ожогов и др. приводит к исчезновению или значительному снижению количества агрессивных видов бактерий. В то же время ДИПЛЕН-ДЕНТА Х практически не оказывает негативного действия на резидентную микрофлору полости рта (*S. Sangis*, *Corynebacterium* sp.). После наложения пленки такие виды, как *Prevotella melaninogenica* и *Prevotella actinomycetes israeli*, в содержимом пародонтальных карманов не обнаруживаются. *Fusobacterium necroferum* и *Prevotella oralis* исчезают на третьи сутки применения пленки, *Actinomycetes* - на седьмые.

В применении пленка очень проста, больные могут накладывать пленку самостоятельно по курсу, предписанному врачом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Пародонтит в фазе обострения, гингивит, стоматит: афтозный, язвеннонекротический и возникший в результате ношения зубных протезов.
- Инфекционные заболевания полости рта.

- Другие острые и хронические формы воспаления десен.
- Послеоперационные раны, травмы, ожоги в полости рта и др.
- Внутрикостная дентальная имплантация.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед началом лечения пленкой ДИПЛЕН-ДЕНТА Х проводится снятие над- и поддесневых зубных отложений и кюретаж по показаниям. Аппликацию пленок проводят следующим образом: отрезают полоску длиной 50 мм и шириной 10 мм (или другого удобного размера) и накладывают клеевой стороной на десну. Как правило, первые 2-3 аппликации проводятся в клинических условиях с одновременным обучением больных технике их самостоятельного применения. Если не требуется специального наблюдения врача, больным для проведения данного этапа лечения предписывают накладывать пленку самостоятельно (предпочтительно на ночь): рекомендуется ежедневные аппликации пленки в 4 квадрантах после чистки зубов 1 или 2 раза в сутки.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ

- Гингивит и пародонтит легкой степени. В большинстве случаев для ликвидации воспалительных явлений в тканях десен достаточно 5-8 аппликаций. Контрольные осмотры проводят через 1, 3, 6 и 12 месяцев после окончания курса лечения.
- Пародонтит средней степени тяжести. Курс лечения пленкой ДИПЛЕН-ДЕНТА Х варьирует в пределах от 6 до 10-11 дней. В случае относительно благополучного течения процесса, когда пародонтальные карманы глубиной до 6 мм выявляются в области отдельных зубов, больным рекомендуется однократное в течение суток наложение пленок с вестибулярной поверхности. У пациентов с признаками активности и генерализации воспалительного процесса в краевом пародонте пленку дополнительно апплицируют с язычной поверхности нижней челюсти и с небной поверхности верхней челюсти. У больных с подобным течением заболевания продолжительность курса лечения достигает 14-15 дней.
- Пародонтит тяжелой степени. Пленки применяют в комплексе с другими пародонтологическими мероприятиями. Лечебная тактика определяется индивидуально для каждого пациента. Наибольшие трудности встречаются при лечении больных с хроническим пародонтитом в стадии обострения, когда помимо, выраженной воспалительной реакции отмечается гноетечение из пародонтальных карманов. В этом случае целесообразно провести предварительный этап лечения. Его проводят пленками ДИПЛЕН-ДЕНТА Л или ДИПЛЕН-ДЕНТА М: дважды в сутки (после утренней и вечерней чистки зубов) с вестибулярной и оральной стороны на десну апплицируют пленку ДИПЛЕН-ДЕНТА Л или ДИПЛЕН-ДЕНТА М. Такие процедуры проводят в течение 3-5 дней в зависимости от состояния и самочувствия пациента.

Как правило, этого достаточно для снятия острых воспалительных явлений, резкого уменьшения или прекращения гноетечения из пародонтальных карманов, что

позволяет приступить к снятию над- и поддесневых зубных отложений и удалению грануляций. После чего приступают к проведению основного курса лечения. Курс лечения пародонтита тяжелой степени пленками ДИПЛЕН-ДЕНТА Х составляет в среднем 17-20 дней. Хороший эффект лечения достигается при сочетании ДИПЛЕН-ДЕНТА Х с ДИПЛЕН-ДЕНТА М или ДИПЛЕН-ДЕНТА Л.

При комбинированном использовании целесообразно начинать лечение с применения пленок ДИПЛЕН-ДЕНТА М или ДИПЛЕН-ДЕНТА Л, которые апплицируются на десну дважды в день в течение 6-8 дней, а затем продолжается лечение пленками ДИПЛЕН-ДЕНТА Х в течение 9-14 дней. Чередование пленок различных марок эффективно при условии непрерывного применения пленок одного вида в течение не менее 6-8 дней. В процессе лечения рекомендуется введение в пародонтальные карманы пленок ДИПЛЕН-ДЕНТА Л или ДИПЛЕН-ДЕНТА М мелкими кусочками.

- Ожоги. В первые сутки при ожогах полости рта развивается явление дисбактериоза, проявляющееся в увеличении числа анаэробов и перераспределении соотношения видов в микробных ассоциациях. Начинают развиваться бациллы и грибы, что свидетельствует об ослаблении местного иммунитета. На фоне поражения слизистой полости рта эти изменения еще более выражены. Пленку ДИПЛЕН-ДЕНТА Х накладывают на пораженную поверхность, перекрывая ее на 1 -2 мм с каждой стороны. Пленка хорошо моделируется на раневой поверхности, плотно прилегает к ее дну без дополнительной фиксации. Пленочное покрытие за счет прозрачности обеспечивает возможность визуального контроля за состоянием раны без смены повязок. При перевязке оставшуюся часть пленки удаляют. Как правило, на седьмые сутки наложения пленок состав микрофлоры приближается к физиологической норме. Пленка создает благоприятные условия для процессов регенерации и эпителизации.

- Профилактика воспалительных осложнений. Пленка ДИПЛЕН-ДЕНТА Х применяется после хирургических вмешательств на тканях пародонта для подавления патогенной микрофлоры в зоне операции, изоляции и механической защиты послеоперационных ран от внешних воздействий.

При операциях внутрикостной дентальной имплантации пленку накладывают в зоне послеоперационного шва ежедневно в течение 5-8 суток на 10-12 часов. При перевязке оставшуюся часть пленки удаляют. При динамическом контроле течения раневого процесса под пленкой установлено, что развитие микрофлоры под ним не происходит, что свидетельствует об удовлетворительных защитных свойствах пленочного покрытия. Пленка сорбирует умеренное количество раневого отделяемого и функционирует на ране без нарушения целостности, обеспечивая благоприятные условия для последующей регенерации и эпителизации.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Гингивит и пародонтит легкой степени. Наблюдается стойкий клинический эффект лечения на протяжении 6 месяцев, сохраняющийся у отдельных больных до одного года. Повторный курс лечения назначается через 9-12 месяцев.
- Пародонтит средней и тяжелой степени. Через 6 месяцев после окончания лечения

в проведении повторного лечения нуждаются примерно 50% больных, однако объем врачебного вмешательства, требующийся на данном этапе, бывает значительно меньше, чем при их первичном обращении. Как правило, требуется снятие только наддесневого зубного камня при отсутствии или минимальном количестве поддесневых зубных отложений; удаленный зубной камень имеет более рыхлую структуру, менее минерализован и не настолько плотно связан с тканями зуба, как до лечения. Повторный курс лечения, как правило, значительно короче первоначального.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

В редких случаях - аллергические реакции на компоненты пленки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам пленки.

УПАКОВКА

В герметичной полиэтиленовой упаковке одна пленка размером 50x100 мм.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Следует хранить пленки в оригинальной упаковке. Оставшуюся после использования часть пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА Х снова вкладывают в упаковочный мешочек, вставляют в конверт и хранят в сухом, прохладном, защищенном от света месте. Не следует использовать пленку после истечения срока годности. Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель препарата

Пленку производит компания «НОРД-ОСТ», г. Москва, РФ.

СРОК ГОДНОСТИ УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

2 года. Указан на упаковке. Отпуск безрецептурный.