

Cleanic

Профилактическая паста для чистки и полировки

Cleanic представляет собой универсальную профилактическую пасту с возможностью различных способов чистки, которая одновременно осуществляет как эффективную начальную чистку, так и последующую полировку. С первых секунд использования паста Cleanic оказывает сильный чистящий эффект, переходящий в мягкую как фрагмент перлитных частиц. Перлитная технология делает пасту Cleanic уникальной зубной пастой, обеспечивающей одновременно сильный чистящий эффект, полировку зубных поверхностей и придание мягкости твердым тканям. С помощью только одной зубной пасты время лечения существенно уменьшается.

Преимущества

- Максимальный чистящий эффект.
- Максимальный эффект полировки и придание блеска зубным поверхностям.
- Минимальное абразивное воздействие на дентин и эмаль.
- Сочетание чистки и полировки в одной пасте.
- Существенное уменьшение времени лечения.
- Максимальная выгода: Экономия времени с помощью однократной дозы (Арт.: № 3140) – это сочетание максимальной выгоды (нет необходимости в предварительной подготовке) и гигиены.

Инструкция Cleanic

Благодаря уникальным возможностям пасты Cleanic, способ ее применения немного отличается от способа нанесения обычных профилактических паст.

1. Выдавлив небольшое количество пасты Cleanic в резиновую крышечку или зубную щетку, можно обработать небольшую группу зубов (2-3), производя чистку и последующую полировку.
2. Пациентам, предрасположенным к повреждениям дентина, следует соблюдать следующую процедуру: сначала, пока паста не ослабила свои абразивные свойства, обработайте участки зубной эмали. После этого приступайте к обработке дентина, так как паста уже не столь абразивна.
3. Зубной налет следует всегда удалять свежей порцией пасты.
4. Во избежание перегрева и разбрызгивания вещества используйте низкие обороты (примерно 3000 оборотов в минуту).