

ДИПЛЕН-ДЕНТА ПФ

Пленка полимерная стоматологическая самоклеящаяся двухслойная для устранения дисколорита (осветления) зубов.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02393,
выдано ООО «Норд-Ост», Москва, РФ.

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА

Пленки ДИПЛЕН ДЕНТА ПФ толщиной 0.02 — 0.06 мм содержит: пероксида водорода 1.2 — 1,5 мг.

СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ

ДИПЛЕН-ДЕНТА ПФ - двухслойная пленка, состоящая из совмещенных гидрофильного и гидрофобного слоев. Предназначена для местного применения в стоматологии, для устранения дисколорита (отбеливания) зубов. В качестве отбеливающего компонента в пленке ДИПЛЕН- ДЕНТА ПФ применяется один из самых распространенных средств для отбеливания зубов - пероксид водорода.

Пероксид водорода включен в гидрофильный слой пленки. Пленка ДИПЛЕН-ДЕНТА ПФ гидрофильной (клеящей) стороной прилагается к зубному ряду, принимает форму зубов фиксируется и удерживается в течение нескольких часов (в среднем 2-4 часа). Под действием механических, химических и др. субстанций, а в основном под действием слюны, лактопероксидазы слюны и бактериальной уреазы, происходит разложение пероксида водорода на кислород и воду. Выделившийся кислород проникает в дентин и эмаль, вызывая окислительное расщепление окрашивающих пигментов, наружный (гидрофобный) слой при этом предотвращает выход компонентов пленки в полость рта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Пленка ДИПЛЕН-ДЕНТА ПФ применяется для устранения дисколорита (отбеливания) зубов, возникшего в результате действия:

- пищевых красителей (ягод черники, черемухи, красного вина и др.
- лекарственных веществ и гигиенических жидкостей для полости рта; (соли хлоргексидина, лактат этакридина, тетрациклин, миноциклин);
- бытовых привычек (курение, злоупотребление кофе, чаем, колой)
- возрастных изменений цвета зубов;
- флюороз
- локальной гипоплазии

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

а) Для отбеливания верхнего зубного ряда отрезают полоску длиной 65-70 мм и шириной 8-10 мм (или другого удобного размера) и накладывают клеящей

стороной на влажную фронтальную поверхность зубного ряда. Пленку надо приклеить аккуратно по линии десен и слегка прижать для лучшего приклеивания

б) аналогично для нижнего зубного ряда: отрезают полоску длиной 50 мм и шириной 8-10 мм и приклеивают, как описано выше. Можно приклеивать верхние и нижние полоски одновременно, можно и в разное время. Аппликацию проводят 2 раза в сутки. При накладывании рекомендуется пользоваться зеркалом.

Курс отбеливания не менее 20 дней. Первые аппликации врач проводит в клинике и после обучения приклеивания назначает домашний курс отбеливания.

В процессе отбеливания в первые минуты под действием выделившегося кислорода пленка на зубах «всучивается», чувствуется вспенивание, затем она плотно прикрепляется к зубному ряду. Отбеливание протекает более интенсивно в первые 2-3 суток, затем более умеренно: к концу третьей недели помимо отбеливания появляется блеск на зубах и общее улучшение цвета, т.е. практическое исчезновение дисколорита зубов. Так как зубы меняют цвет по разным причинам (возраст, курение, чай, кофе и т.д), следовательно, отбеливаются они по-разному. Если дисколорит останется, можно повторить курс отбеливания.

Пленка ДИПЛЕН-ДЕНТА ПФ хорошо переносится, не вызывает дискомфорта или какие-либо неудобства. Несмотря на длительность применения, каких-либо негативных воздействий на твердые ткани зубов и слизистой оболочки десен не наблюдалось.

Для сохранения белизны зубов применяйте пленки каждые 6 месяцев или по необходимости.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛЕНОК ДИПЛЕН-ДЕНТА ПФ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОТБЕЛИВАНИЯ:

1. Пленки бесцветны и не заметны на поверхности зубов. Их можно приклеивать днем и вести повседневную общественную деятельность.
2. Процедура отбеливания проста — пациент самостоятельно накладывает пленку на зубной ряд. Врач-стоматолог проводит обучение технике приклеивания: и определяет тактику домашнего отбеливания,
3. Никаких приспособлений или средств (изготовление капл и уход за ними, применение специальных физических средств, клеев и др.) для отбеливания пленками ДИПЛЕНДЕНТА ПФ не требуется.
4. Для достижения лучшего результата желательно не чистить зубы непосредственно перед аппликацией.
5. Пленка герметично приклеивается к зубам, что значительно снижает вероятность выхода заметного количества пероксида водорода и других компонентов гидрофильного слоя в околозубное пространство и в конечном счете в полость рта.

Не рекомендуется применять пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА ПФ:

- беременным и кормящим матерям
- детям до 12 лет.

Пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА ПФ не предназначены для отбеливания коронок, пломб, пластмассовых зубов, в период использования аппаратов на зубной фиксации (брекетов).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Пленка ДИПЛЕН-ДЕНТА ПФ предназначена для домашнего отбеливания, однако процесс отбеливания должен проводиться строго по рекомендации и курсу, назначенному врачом. Запрещается неконтролируемое потребительское использование пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА ПФ.

В процессе отбеливания зубы могут стать чувствительными. Это не опасно и вызвано действием пероксида водорода. Если чувствительность сильно повышена, то следует уменьшить количество накладываний до одного раза в день или сделать перерыв на 2—3 дня.

Иногда могут появляться белые пятна, которые проходят в процессе отбеливания или после его завершения. Если пленка приклеена неаккуратно, то в первые 5-10 минут может возникнуть жжение в десне, которое, затем проходит.

При использовании пленок ДИПЛЕН-ДЕНТА ПФ отбеливание более, чем их естественный цвет, не происходит

Пленка не повреждает эмаль. Если цвет зубов изменился в связи с применением лекарств, то отбеливание протекает менее эффективно,

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам пленки.

УПАКОВКА

В упаковке 4 пленки:

- а) 2 размером 70*100 мм для отбеливания верхнего зубного ряда;
- б) 2 размером 50x100 мм для отбеливания нижнего зубного ряда.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Следует хранить пленку в оригинальной упаковке, Оставшуюся после использования часть пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА ПФ снова вкладывают в упаковочный мешочек, вставляют в коробку и хранят в сухом, защищен от света месте, при температуре не превышающей 5-10 С.

Не следует использовать пленку после истечения срока годности.

Хранить пленку в недоступном для детей месте!

СРОК ГОДНОСТИ УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
2 года. Указан на упаковке. Отпуск безрецептурный.