

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
воска зуботехнического
«БЕЛОВАКС»[®]
по ТУ 9391-104 -45814830-2007
(валики прикусные)

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Воск зуботехнический «Беловакс» (валики прикусные) (далее по тексту – валики прикусные «Беловакс») предназначены для регистрации прикуса или определения окклюзионных соотношений беззубых челюстей пациента.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Валики прикусные «Беловакс» выпускаются в виде прямоугольных палочек длиной 14,0 см или в виде подков той же длины. Валики прикусные «Беловакс» изготавливаются из восковой композиции, состоящей из парафина, церезина, природной смолы и модифицирующих добавок.

Температура размягчения – 40-45°С.

Валики прикусные «Беловакс» легко формируются в разогретом состоянии и обрабатываются при комнатной температуре острым инструментом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Обжать гипсовую модель разогретым базисным воском «Беловакс».

Восковой валик, разогретый над пламенем горелки или в теплой (45-50°С) воде, согнуть по форме челюсти. Валик в виде подковы, при необходимости, разогревают и корректируют по форме челюсти. Горячим шпателем зафиксировать восковой валик на модель. Излишки воска аккуратно обрезать зуботехническим шпателем.

ФОРМА ВЫПУСКА

Палочки	- 150 г (10 шт.)
Подковы	- 90 г (6 шт.) или 1,5 кг (100 шт.)
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск валиков прикусных «Беловакс» в виде отдельных изделий или другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом темном прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Избегать попадания прямых солнечных лучей!

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30°С до +30°С.

Срок хранения – 5 лет.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки валиков прикусных «Беловакс» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00962 от 26.09.2017г.