



**Produits Dentaires SA**

Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey . Switzerland

**RU**

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

## Гранулотек

Безэвгенольная, рентгенконтрастная паста (порошок + жидкость) для постоянной obturации инфицированных корневых каналов, в частности при наличии гранулемы.

### Состав

(Пропорция: 1 часть порошка/1 часть жидкости)  
Дексаметазона ацетат 0,1 %, Формальдегид, Фенол, Гваякол, Йодоформ, наполнитель

### Свойства

Granulotек не содержит эвгенола, не рассасывается, обладает бактерицидными и рентгенконтрастными свойствами; применяется для постоянного пломбирования инфицированных каналов, после экстирпации пульпы и лечения корневых каналов, в частности, в присутствии гранулемы. Материал обеспечивает дезинфекцию каналов, резорбцию гранулемы и регенерацию периапикальных тканей. Кроме того, может применяться в качестве постоянной obturации неинфицированных (витальных) зубов.

### Показания

- > постоянная obturация инфицированных корневых каналов, особенно при наличии гранулемы
- > постоянная obturация неинфицированных каналов корня зуба

### Применение

#### 1. Инфицированные зубы

- > Используйте традиционные методы для расширения и подготовки корневых каналов
- > Тщательно очистить канал и высушить перед применением Granulotек
- > Смешайте порошок и жидкость, чтобы получить пасту средней кремообразной консистенции
- > Внесите пасту в канал с помощью пастонаполнителя # 35, длиной 25 мм, вращая инструмент вперед и назад при постоянном движении в канале от коронки к апексу и назад. Эта техника простая и эффективная
- > Убедитесь, чтобы ввести пасту до апикального уровня и обеспечить контакт с гранулематозной тканью. Противопоказание: не обрабатывать зуб вблизи дентального нерва
- > По возможности произвести рентген-контроль через 3 месяца
- > В случае тяжелого инфицирования зуба, целесообразно после завершения obturации провести лечение антибиотиками и анальгетиками
- > Следует отметить, что зуб может быть болезненным в течение нескольких дней после лечения, эту боль можно купировать анальгетиками

#### 2. Неинфицированные зубы

Применение материала по той же методике, исключая назначение антибиотиков.

#### 3. Частный случай обнаружения сломанного инструмента при прохождении канала

В случае невозможности извлечь сломанный инструмент в апикальной трети корня зуба, в связи с апикальной инфекцией: Следует расширить канал до контакта с инструментом и заполнить это пространство с помощью Granulotек, лечебный эффект которого будет действовать за счет диффузии. Следует провести рентген-контроль через 1 год после лечения.

### Предупреждение

Granulotек содержит химические вещества, которые могут быть токсичными при вдыхании или проглатывании. Контакт с кожей может вызвать раздражение, ожог или аллергию. При попадании в глаза, промыть проточной водой. При попадании вовнутрь, потребуйте, чтобы пациент выпил много воды. Проконсультируйтесь с врачом.

### Хранение

Хранить при комнатной температуре от 5°C до 30°C, в месте защищенном от прямого света и влажности

**Срок годности** 3 года

### Упаковка

Порошок 20 г + Жидкость 15 мл

АРТ.  
11571

- > только для профессионального применения в стоматологии
- > СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ