



Produits Dentaires SA

Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey . Switzerland



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Iodoform Gauze

Повязка для лечения постэкстракционных лунок

Состав

5% бинт йодоформный: 100 г бинта смоченного в 5 г йодоформа;

Свойства

Iodoforme gauze обладает мягким анестезирующим и антисептическим действием. Взаимодействуя с раневым экссудатом и жирными кислотами, йодоформ выделяет свободный йод, который в комплексе с белками обладает выраженным бактерицидным действием.

Показания

- > профилактика периодонтальной инфекции;
- > постэкстракционная дезинфицирующая повязка;
- > дезинфекция синусов верхней челюсти.

Указания по применению

Отрезать бинт необходимой длины для закрытия постэкстракционной лунки и аккуратно поместить в полость для лечения. Бинт не резорбируется и может оставаться на срок от 2 до 8 дней до удаления.

Упаковка

флакон, содержит пропитанный бинт шириной 22 мм и длиной 5 м

Упаковка

5% йодоформом
10% йодоформом

код

11480
11481

- > ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
- > ПРОИЗВОДСТВО ШВЕЙЦАРИИ