



VILLACRYL STC HOT



ОПИСАНИЕ

Villacryl STC HOT — это полимерный материал горячего отверждения, предназначенный для облицовки коронок и мостов, а также для изготовления временных реставраций.

- Быстрая полимеризация,
- Возможность изготовления временных коронок и мостовидных протезов,
- Возможность облицовки металлических конструкций,
- Естественность реставрации,
- Оптимальная прочность и гибкость,
- Цвета полимера, которые максимально приближены к шкале оттенков VITA®, прекрасно сочетаются с оттенком зубов пациента.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические данные

*Согласно норме EN ISO 10477 „Полимерные материалы для коронок и мостовидных протезов“.

Пропорция смешивания	2,4 г порошка / 1 мл (1 г) жидкости
Время приготовления теста	8 -10 мин
Время пригодности теста к использованию	20 мин
Время полимеризации	10 мин – 80°C + 100°C 30 мин – 100°C
Растворимость	< 7,5* µg/мм ³
Сорбция	< 40* µg/мм ³

Цвета

согласно Vita® Classic

- A1 • A2 • A3 • A3,5 • A4
- B1 • B2
- C2 • C4
- D2

Упаковки

Наборы	
V210Z11: Villacryl HOT	
A1	V210A1Z01: 80 г + 40 мл
A2	V210A2Z02: 80 г + 40 мл
A3	V210A3Z03: 80 г + 40 мл
A3,5	V210A35Z04: 80 г + 40 мл
A4	V210A4Z05: 80 г + 40 мл
B1	V210B1Z06: 80 г + 40 мл
B2	V210B2Z07: 80 г + 40 мл
C2	V210C2Z08: 80 г + 40 мл
C4	V210C4Z09: 80 г + 40 мл
D2	V210D2Z12: 80 г + 40 мл