

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

материала-пасты стоматологической для девитализации пульпы зуба
методом мортальной экстирпации

«ДЕВИТ®-АРС»

по ТУ 9391-075-45814830-2002

НАЗНАЧЕНИЕ

Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации «Девит-Арс» (далее по тексту – материал «Девит-Арс») предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации.

Материал «Девит-Арс» предназначен для применения в условиях медицинского учреждения только в стоматологии.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Девит-Арс» представляет собой готовую к применению пасту, содержащую:

- мышьяковистый ангидрид (30%), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон;
- лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность тканей;
- эвгенол - антисептик широкого спектра действия;
- волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность.

Девитализация пульпы происходит в течение 24-48 часов в зависимости от строения зуба (однокорневой или многокорневой), дозировки пасты, а также плотности слоя дентина, покрывающего пульпу при непрямом контакте пасты с ней.

Время нахождения препарата в полости зуба не должно превышать 72 часов.

Во избежание мышьяковистого некроза необходимо проинструктировать пациента о необходимости своевременной явки в указанный срок и немедленного обращения к врачу в случае утечки девитализирующей пасты через временную пломбу.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

При использовании материала «Девит-Арс» в случаях острых пульпитов и гнойных пульпитов необходимо применять анальгетики и проводить противовоспалительное лечение.

ВНИМАНИЕ: При работе с материалом необходимо строго соблюдать меры предосторожности. Материал следует хранить в закрытом шкафу, отдельно от других стоматологических материалов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

С помощью экскаватора удалить кариозный разрушенный дентин. На дентин ближе к рогу пульпы или на рог пульпы (в случаях перфорации дентина) поместить с помощью зонда без нажима необходимое количество пасты (шарик диаметром 2мм

или 1-2 дозы) и герметично, но без надавливания, покрыть водным дентином («Дентин – порошок» на водной основе) негустой консистенции.

После девитализации пульпы при условии отсутствия боли через 24-48 часов (определяется врачом индивидуально) необходимо провести дальнейшее лечение.

После механической и антисептической обработки каналы запломбировать, изолировать подкладочным материалом и реставрировать коронку зуба.

В случаях пребывания материала в полости зуба в течение излишне долгого времени (более 72 часов) могут возникнуть болезненные проявления в альвеолярной кости. В таких случаях необходимо удалить материал из полости зуба и каналов, провести дополнительную обработку каналов с целью нейтрализации мышьяковистого ангидрида.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (шприц или банка)- 3,0 г или 6,5 г

Инструкция по применению- 1 шт.

Картонная упаковка- 1 шт.

или

Паста дозами- 100 шт. по 4 мг

Инструкция по применению- 1 шт.

Картонная упаковка- 1 шт.

Допускается выпуск материала «Девит-Арс» другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до + 25°С.

Герметично закрывать банку после каждого применения.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от - 30°С до +30°С.**

Срок годности - 2 года.