

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набора гелей для отбеливания, реминерализации
и фторирования эмали зубов
«БЕЛАГЕЛЬ®»
по ТУ 9391-050-45814830-2004
(гель для фторирования зубов «БЕЛАГЕЛЬ®»-F)

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Набор гелей для отбеливания, реминерализации и фторирования эмали зубов «Беллагель»-F (далее по тексту – гель «Беллагель»-F) применяется для профилактики кариеса зубов, а также при гиперестезии зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях эмали и других некариозных поражениях.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Гель «Беллагель»-F - стоматологический гель на основе природного полисахарида. Гель «Беллагель»-F характеризуется высокой проникающей способностью ионов фтора (F-) в ткани зуба, стимулирует минерализацию твердых тканей зуба, способствует восстановлению зубной эмали и предохраняет зубы от кариеса.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ:

Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

Рекомендуются два способа применения геля «Беллагель»-F:

- в виде пленки для аппликаций;
- с использованием каппы с целью длительного воздействия.

На очищенные от налета и высушенные зубы нанести гель «Беллагель»-F и обработать потоком воздуха до образования пленки (в течение 5 минут).

Чтобы избежать преждевременного удаления пленки, пациенту рекомендуется в течение 12 часов не принимать твердую пищу и не чистить зубы.

При использовании каппы (изготовленной индивидуально) необходимое количество геля нанести тонким слоем на внутреннюю поверхность каппы. Каппу зафиксировать на зубах на время, определенное индивидуально (4-10 часов) для каждого отдельного случая. Наибольший эффект достигается при использовании каппы во время сна.

В лечебных целях фторирование проводят курсом до 4-х аппликаций с интервалом 3 дня.

Для профилактики кариеса у школьников гелем «Беллагель»-F покрывают все зубы: при I степени активности кариеса - 2 раза в год, при II степени активности - 4 раза в год.

ФОРМА ВЫПУСКА

Гель (шприц)	- 5 мл
Аппликаторы в п/э пакете типа «Ziplock»	- 10 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.
или	
Гель (туба)	- 10 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск геля «Беллагель»-F другой комплектности или в виде отдельных изделий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в плотно закрытой таре в сухом темном месте при температуре от **+5°C до +25°C**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от **- 30°C до + 30°C**. Срок годности – **3 года**.

ВНИМАНИЕ

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки геля «Беллагель»-F и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06282 от 23.10.2017 г.
Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.