



**Торговое название:** Champion Bond

**Описание продукта:**

Универсальный однокомпонентный этанолсодержащий светоотверждаемый бондинг для надежной адгезии светоотверждаемых композитных реставраций к твердым тканям зуба. Разработан для двухэтапного применения: протравливание и последующее нанесение однокомпонентного адгезива Champion bond.

Способствует максимальному сохранению тканей зуба, позволяет изолировать пульпу от действия всех типов раздражителей и добиться высоких показателей сцепления стоматологических материалов с твердыми тканями зуба.

**Показания к применению:**

- Прямые композитные реставрации (I, II, III, IV и V класса)
- Адгезивная фиксация композиционных материалов, компомеров при прямой реставрации зубов
- Адгезивная фиксация вкладок, накладок, виниров и коронок из керамики и композитных материалов при непрямой реставрации

**Состав:**

НЭМА, Диметакрилатные смолы, Этанол, Вода, 10-MDP Phosphate мономер, Сополимер, Силан, Инициаторы

**Способ применения:**

Просушить подготовленные поверхности после протравливания эмали, дентина.

Отпрепарируйте зуб, применяя стандартную технику. Для защиты прилегающих тканей используйте коффердам. Для перекрытия пульпы используйте гидроокись кальция

**Нанесение материала:**

- Перед применением встряхните флакон
- Нанесите несколько капель материала на чистый блок для замешивания
- Закройте плотно бутылочку крышкой
- Нанесите материал на подготовленную поверхность эмали и дентина с помощью аппликатора.
- Дайте материалу подсохнуть 5-10 секунд.
- Тщательно просушите поверхность в течение 5 секунд

Перед применением на непрепарированной эмали ее следует обработать 35-40% гелем фосфорной кислоты, промыть водой и аккуратно подсушить.

**Комплектация:**

1 x флакон 6 грамм

1 x инструкция по применению

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала, аллергия. Может вызывать раздражения в результате прямого контакта с пульпой. Поэтому область вокруг пульпы следует покрыть тонким слоем гидроксида кальция.

**Взаимодействие с другими материалами:**

Нельзя использовать вместе с прокладками, содержащими эвгенол, так как фенол препятствует полимеризации.

**Меры предосторожности:**

Беречь от детей!

Перед использованием наденьте подходящую защитную одежду и перчатки.

Избегайте контакта с глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Работать в защитных перчатках.

При возникновении аллергических реакций у особо чувствительных пациентов следует удалить материал и отказаться от его дальнейшего применения.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре от 4 ° C до 25 ° C; относительная влажность 10-95%

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Беречь от влаги.

**Срок годности:**

3 года с даты изготовления

**Утилизация изделия:**

Изделие не относится к опасным отходам. Утилизировать в соответствии с общепринятой медицинской практикой и применимыми местными, государственными и федеральными законами и нормативными актами. Класс опасности для медицинских отходов с учетом спецификации морфологического состава (в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами Российской Федерации 2.1.7.2790-10): Класс А

**Производитель медицинского изделия:**

Queen Dental GmbH

Neue Straße 67, 99846 Seebach, Germany

Телефон: +49 36929 139999

E-mail: sales@queen-dental.de