

<b>FUSION ULTRA D/C</b> фиксирующий универсальный композитный цемент двойного отверждения	 <b>PREVEST DenPro®</b> БУДУЩЕЕ СТОМАТОЛОГИИ												
<p><b>Описание продукта:</b> Fusion Ultra D/C – свето и химически отверждаемый рентгеноконтрастный двухкомпонентный адгезивный композитный цемент низкой вязкости на основе полимерной смолы для фиксации композитных и керамических реставраций.</p> <p><b>Состав: Основная паста:</b> бисфенол А глицидил метакрилат, этоксилированный диметакрилат бисфенола А, триэтиленгликоль-диметакрилат, порошок силанированного бариевого стекла, аморфная коллоидальная двуокись кремния, отвердитель и стабилизатор.</p> <p><b>Паста-катализатор:</b> бисфенол А глицидил метакрилат, этоксилированный диметакрилат бисфенола А, триэтиленгликоль-диметакрилат, порошок силанированного бариевого стекла, аморфная коллоидальная двуокись кремния, отвердитель и стабилизатор.</p> <p><b>Показания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Постоянное цементирование коронок и мостов.</li> <li>♦ Постоянное цементирование эндодонических штифтов из металла, армированных композитов.</li> <li>♦ Постоянное цементирование коронок с опорой на имплантат.</li> </ul> <p><b>Инструкция по применению:</b> Выдавите первоначальное небольшое количество цемента через автосмешивающую канюлю и утилизируйте. Отмерьте цемент из шприца с помощью автосмешивающей канюли в зону установки. Первичное затверждение наступает через 2:00 - 2:30 (мин:сек), а конечное через 3 - 4 минуты. Для отверждения цемента можно использовать стоматологическую фотополимеризацию, время воздействия - 40 секунд.</p>													
<p><b>Варианты применения:</b></p>													
<p><b>1. Металл к эмали/дентину (металлические реставрации к структурам зуба: коронки, вкладки, мосты и штифты, включая мосты типа Мэриленд).</b> После подгонки выполнить пескоструйную обработку реставрации с каждой стороны. Используя металлическую грунтовку по выбору, обработать металлическую поверхность, на которую будет нанесен цемент. Очистить зубы с помощью профилактической пасты без фтора или пемзы. Чтобы подготовить зуб к бондированию, использовать универсальную систему бондирования для дентина / эмали. Смешайте одинаковые количества паст базы и катализатора и используйте пластиковый инструмент или инъекционную систему для внесения в реставрацию. Не допускать попадания пузырьков воздуха. Установить непрямою металлическую реставрацию на зубе и удерживать ее до тех пор, пока не наступит первичное затверждение (около 2:00 - 2:30 минут). Использовать скалер или зубной зонд, чтобы удалить излишки цемента сразу после первичного затверждения. Удалять излишки цемента можно, не ожидая окончательного затверждения.</p>													
<p><b>2. Металл к металлу (зубные импланты или коронки на штифтах).</b> Выполнить пескоструйную обработку всех внешних металлических поверхностей, на которые будет нанесен цемент. Придать шероховатость внутриротовому металлу с помощью пескоструйки или бора. Используя металлическую грунтовку по выбору, обработать металлическую поверхность, на которую будет нанесен цемент. Очистить штифты или абатменты с помощью фторированной профилактической пасты или пемзы. Смешайте одинаковые количества паст базы и катализатора и используйте пластиковый инструмент или инъекционную систему для внесения в реставрацию. Не допускать попадания пузырьков воздуха. Установить непрямою реставрацию на зубе и удерживать ее до тех пор, пока не наступит первичное затверждение (около 2:00 - 2:30 минут). Использовать скалер или зубной зонд, чтобы удалить излишки цемента сразу после первичного затверждения. Удалять излишки цемента можно, не ожидая окончательного затверждения.</p>													
<p><b>3. Керамические реставрации к зубам (керамические виниры, вкладки, накладки)</b> После подгонки протравить непрямою реставрацию и поместить в ультразвуковую мойку с уксусом или этанолом на 1-2 минуты. Нанести силановое средство на поверхности керамической реставрации, куда будет наноситься цемент. Очистить зубы с помощью профилактической пасты без фтора или пемзы. Подготовьте зуб к бондированию, используйте универсальный бондинговый агент для дентина и эмали. Смешайте одинаковые количества паст базы и катализатора и используйте пластиковый инструмент или инъекционную систему для внесения в реставрацию. Не допускать попадания пузырьков воздуха. Установить непрямою реставрацию на зубе и удерживать ее до тех пор, пока не наступит первичное затверждение (около 2:00 - 2:30 минут). Использовать скалер или зубной зонд, чтобы удалить излишки цемента сразу после первичного затверждения. Удалять излишки цемента можно, не ожидая окончательного затверждения.</p>													
<p><b>Меры предосторожности:</b>          Данный продукт застывает на металлическом инструменте. Удалить излишки материала с инструмента сразу после использования. Цемент содержит метакрилаты и другие ингредиенты, которые могут вызывать раздражение или сенсибилизацию у некоторых людей. При попадании на кожу немедленно промыть водой с мылом. Неправильное использование может привести к возникновению аллергической реакции или раздражению кожи и тканей. В этом случае прекратить использование данного продукта. При работе с этим продуктом следует надевать защитные перчатки и очки. При попадании данного продукта в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в прохладном месте, беречь от яркого света. Не хранить возле материалов на спиртовой основе. Не снимать и не переворачивать крышки шприцев, так как это может способствовать полимеризации.</p>													
<p><b>Условия хранения:</b></p>													
<p>Хранить при температуре от 10 ° С до 24 ° С. Тщательно закрывать крышку после использования. Хранить в сухом месте. При хранении в сухом прохладном месте после вскрытия упаковки годен в течение указанного срока хранения.</p>													
<p><b>Срок годности:</b> 2 года от даты изготовления</p>													
<p><b>Упаковка:</b> Кат.№: 30006</p>													
<p><b>Начальный набор:</b> 1 дозатор для автоматического замешивания объемом 9г + 10 автосмешивающих канюль</p>													
<p><b>Утилизация:</b> Утилизировать в соответствии с действующими правилами страны использования.</p>													
 <b>Prevest DenPro Limited</b> Unit II, EPIP, Bari Brahmana, Jammu-181133, India. wwwprevestdenpro.com Custome Care No.: 1800-180-7172 Email: customercare@prevestdenpro.com	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="576 1509 734 1556">EC</td> <td data-bbox="734 1509 933 1556">REP</td> <td data-bbox="933 1509 1189 1556" rowspan="2">   <b>0123</b> </td> <td data-bbox="1189 1509 1495 1556">         Редакция : 05       </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="576 1556 933 1702"> <b>Obelis s.a</b>          Boulevard General Wahis 53          1030Brussels, Belgium          Tel: +(32) 27325954, Fax +(32) 27326003          E-mail: mail@obelis.net       </td> <td data-bbox="1189 1556 1495 1702">         Дата : 23-05-2019       </td> </tr> </table>	EC	REP	 <b>0123</b>	Редакция : 05	<b>Obelis s.a</b> Boulevard General Wahis 53 1030Brussels, Belgium Tel: +(32) 27325954, Fax +(32) 27326003 E-mail: mail@obelis.net		Дата : 23-05-2019					
EC	REP	 <b>0123</b>	Редакция : 05										
<b>Obelis s.a</b> Boulevard General Wahis 53 1030Brussels, Belgium Tel: +(32) 27325954, Fax +(32) 27326003 E-mail: mail@obelis.net			Дата : 23-05-2019										
<table border="0"> <tr> <td> Код партии</td> <td> Использовать до</td> <td> Не стерильно</td> <td> Беречь от влаги</td> <td> Осторожно!</td> <td> Обратитесь к руководству по эксплуатации</td> </tr> <tr> <td> Номер в каталоге</td> <td> Официальный представитель в ЕС</td> <td> Не применять при повреждении упаковки</td> <td> Беречь от детей</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Наименование и адрес изготовителя  Ограничение температуры  Не допускать попадания солнечного света</p>		 Код партии	 Использовать до	 Не стерильно	 Беречь от влаги	 Осторожно!	 Обратитесь к руководству по эксплуатации	 Номер в каталоге	 Официальный представитель в ЕС	 Не применять при повреждении упаковки	 Беречь от детей		
 Код партии	 Использовать до	 Не стерильно	 Беречь от влаги	 Осторожно!	 Обратитесь к руководству по эксплуатации								
 Номер в каталоге	 Официальный представитель в ЕС	 Не применять при повреждении упаковки	 Беречь от детей										
<p>Материал разработан исключительно для профессионального использования в стоматологии. Применение должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией по применению. Ответственность за ущерб, возникший из-за несоблюдения предписанных условий применения, не принимается. Пользователь несет ответственность за проверку материала на его пригодность и использование в любых целях, являю не указанных в данной инструкции. Описание и данные не являются гарантией свойств и не носят обязывающий характер.</p>													
<p><b>FUSION ULTRA D/C</b> фиксирующий универсальный композитный цемент двойного отверждения          Материалы композитные стоматологические <b>FUSION</b> с принадлежностями.          Комплектацию смотри на упаковке. Производитель: «Превест Денпро Лимитед», Индия, PREVEST DENPRO LIMITED, Export Promotion Industrial Park, (EPIP), Bari Brahmana, 181133 Jammu, India. РУ: № ФСЗ 2011/10852 от 27.02.2020 г. Срок годности указан на упаковке.          Утилизировать в соответствии с действующим законодательством РФ. Уполномоченная организация для предъявления претензий на территории РФ:          ООО СП «ХИРАТРЕЙД», тел.: +7(4922) 42-05-32, email: info@hiratrade.ru</p>													