

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала-пасты безмышьяковистой для девитализации пульпы зуба
«ДЕВИТ®» -П
(педодонтической)
по ТУ 9391-062-45814830-2002

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «Девит»-П (педодонтическая) (далее по тексту – материал «Девит»-П) предназначена для девитализации пульпы и мумификации молочных зубов в случаях, когда экстирпацию пульпы можно исключить.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Материал «Девит»-П содержит:

- параформ - антисептик, коагулирующий альбумины, обеспечивая девитализацию пульпы;
- лидокаина гидрохлорид, локально анестезирующий и снижающий опасность возникновения болезненных реакций;
- хлорфенол, камфору и ментол – компоненты, усиливающие антисептическое действие препарата;
- пастообразователь и наполнитель, придающий пасте волокнистую структуру.

Девитализация пульпы временных зубов сопровождается эффективной стерилизацией, что делает возможным не удалять пульпу и избежать болезненной для ребенка процедуры.

ВНИМАНИЕ: *Материал «Девит»-П противопоказан для лиц, имеющих повышенную чувствительность к параформу и другим компонентам состава.*

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Очистить полость зуба от кариозного дентина и вскрыть пульповую камеру. В случаях значительного некроза поверхности пульпы, необходимо под аппликационной анестезией снять часть некротизированной пульпы. Небольшое количество материала «Девит»-П (шарик диаметром 1-2 мм) с помощью инструментов поместить без давления на вскрытый рог пульпы и герметично закрыть полость временным пломбировочным материалом «Дентин-паста».

Полная девитализация пульпы происходит за 3-5 дней, после чего необходимо провести постоянное пломбирование. (Если пациент не ощущает боли, постоянное пломбирование возможно уже через 24-48 часов применения материала «Девит»-П.)

ВНИМАНИЕ: *При усилении пульпитной боли после наложения пасты (не вскрыт рог пульпы или паста наложена очень плотно) необходимо выполнить инфльтрационную анестезию лидокаином.*

Во избежание химического ожога не допускать подтекание препарата на слизистую!

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (шприц) - 3,0 г

Инструкция по применению - 1 шт.

Картонная упаковка - 1 шт.

Допускается выпуск материала «Девит»-П другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, в плотно закрытом шприце, при температуре от +5°C до +25°C.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30°C до +30°C.

Срок годности - 2 года.