

Eugenol

Жидкость для цинкооксидэвгенольных цементов

Состав Эвгенол 100%.

Описание

Эвгенол – эфирное масло, получаемое из гвоздичного масла. Наряду с оксидом цинка входит в состав цинкооксидэвгенольных цементов, используемых в стоматологии благодаря биосовместимости как с мягкими, так и с твердыми тканями полости рта.

Показания к применению ЦОЭ цементов

– Временная obturation корневых каналов.

– Непрямое покрытие пульпы

Способ применения

Смешайте порошок окиси цинка с эвгенолом в пропорциях порошок (г)/жидкость (г) в пределах 1,1 ÷ 1,7.

Процесс схватывания начинается в присутствии влаги. Увеличение влажности или температуры ускоряет схватывание.

Время схватывания (протестировано в соответствии с ISO 3107) составляет 6450-16 ч в зависимости от соотношения порошок/жидкость.

Хранение

Хранить при комнатной температуре 5°C-30°C, защищенном от прямого света месте. Плотно закрывать емкость после использования.

Меры предосторожности

Из-за присутствия в составе эвгенола избегайте использования цемента с наполнителями на основе смол.

При работе с препаратом следует надевать перчатки и защитные очки. В случае контакта с кожей промыть большим количеством воды с мылом. При появлении раздражения обратиться к врачу.

В случае контакта с глазами в течение 15 минут осторожно промывать мягкой чистой водой, приоткрывая веки, и обратиться к врачу.

В случае проглатывания промыть рот. Пейте много воды водой и обратитесь к врачу. Обеспечьте покой пациенту, проглотившему препарат, и не пытайтесь вызвать у него рвоту.

В случае тугого продвижения поршня не прилагайте чрезмерных усилий при нахождении шприца во рту пациента во избежание неконтролируемого выброса материала. Не используйте в случаи известных гиперчувствительности к любому из этих ингредиентов.

Не использовать при аллергической реакции на эвгенол.

Упаковка

Флакон 15 мл

Флакон 30 мл

Флакон 100 мл

REF

11420

11421

11422

только для профессионального применения в стоматологии.



Produits Dentaires SA

Rue des Bosquets 18

1800 Vevey . Switzerland

pd-dental.com

PD 241021