

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала стоматологического антисептического
гемостатического для зубных лунок
«АЛЬВАНЕС®»
(порошок)
по ТУ 9391-048-45814830-2001

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал стоматологический антисептический гемостатический для зубных лунок «Альванес» (порошок) (далее по тексту – порошок «Альванес») применяется как гемостатическое средство при снятии камней, кюретаже пародонтальных карманов, гингивэктомии, выравнивании гребнеобразных альвеолярных отростков, обработке зубных лунок и после снятия слепков. Для больных гемофилией применяются обычные способы лечения.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Порошок «Альванес» – препарат, останавливающий капиллярное кровотечение. Мелкодисперсный порошок легко распыляется, покрывая кровоточащую поверхность слизистой.

В состав порошка «Альванес» входят:

- природный пищевой полисахарид, образующий с кровью гель;
- альгинат натрия, ускоряющий образование сгустков крови;
- антисептик (иодоформ 0,01%).

Порошок «Альванес» нетоксичен, его можно совмещать как с антибиотиками, так и с антисептиками.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Порошок «Альванес» применяется методом пульверизации или тампонирования. В случае слабого кровотечения обработать ранку тампоном из стерильной гигроскопической марли и нанести на поверхность ранки тонкий слой препарата пульверизацией.

В случае длительного кровотечения необходимо подождать, пока из ранки выделится достаточное количество крови, излишки ее удалить тампоном из стерильной гигроскопической марли. Тампонирование необходимо для того, чтобы обеспечить прямой контакт между капиллярами и артериолами, с одной стороны, и препаратом «Альванес» с другой.

В условиях отсутствия крови необходимо слегка надавить на обрабатываемое место до побледнения поверхности, затем распылить препарат на поверхность. По окончании пульверизации необходимо убедиться в том, что вся поверхность и края ранки хорошо покрыты тонкой пленкой препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок (флакон)	- 7 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск порошка «Альванес» другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом месте в герметично закрытых флаконах при температуре **от +5°C до +25°C**, избегать попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности - **3 года**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°C до +30°C**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки порошка «Альванес» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.