

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
материала для защиты от воздействия слюны  
в процессе твердения пломб  
**«АКСИЛ»**  
по ТУ 9391-040-45814830-2001

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал для защиты от воздействия слюны в процессе твердения пломб **«Аксил»** (далее по тексту – паста **«Аксил»**) предназначен:

- для покрытия пломб и их защиты от воздействия слюны в течение 1,5-2 часов;
- для защиты десны при отбеливании эмали зубов.

**СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА**

Паста **«Аксил»** содержит гидрофобный биосовместимый компонент, обладает водоотталкивающими свойствами и не раздражает слизистую полости рта.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

**ВНИМАНИЕ:**

*Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

**Для покрытия пломб** на полированную, тщательно высушенную поверхность пломбировочного материала кисточкой нанести тонким слоем пасту **«Аксил»**.

**Для защиты слизистой** на высушенную десну нанести кисточкой тонким слоем пасту **«Аксил»**.

**ФОРМА ВЫПУСКА**

Паста (шприц)	- 5,0 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск пасты **«Аксил»** другой комплектности и в наборах с другими стоматологическими материалами.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре **от +5°C до +25°C**.

Срок годности - **3 года**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°C до +30°C**.

**ВНИМАНИЕ:**

*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.*

*Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.*

*Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.*