

Flairesse

Prophylaxis paste



RU Информация по применению

Инструкция по применению:

Русский

Описание продукта

Паста для чистки и полировки зубов, предназначенная для профессиональной чистки зубов и полировки их поверхностей в рамках профилактической обработки. Профилактическая паста Flairesse поставляется в контейнерах для однократного применения или в тубиках. Обе формы выпуска доступны в нескольких вкусовых вариантах. Благодаря трем различным уровням абразивного действия можно подбирать пасту для каждого пациента индивидуально в зависимости от степени загрязнения.

Показания

- Удаление твердого и мягкого зубного налета.
- Устранение дисколорита зубов, вызванного пищевыми красителями и табаком.

Противопоказания

- Материал нельзя применять,
- если существует аллергия к составляющим веществам или контактная аллергия,
 - если пациент не может контролировать глотательный рефлекс.

Общие меры предосторожности:

- Предназначен исключительно для применения в стоматологии.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не глотать!
- Избегать контакта с глазами! В случае непреднамеренного контакта с глазами немедленно и тщательно промыть глаз большим количеством воды и при необходимости проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Проглатывание чрезмерного количества материала может привести к тошноте и рвотным позывам.

Способ нанесения

- Unit Dose
- Тубик

Указания по применению:

- ▶ Могут использоваться любые представленные на рынке одноразовые профилактические контругловые наконечники или полировочные чашечки.
- ▶ Фирма DMG рекомендует использовать пасты поочередно одна за другой (со снижением уровня абразивного действия). Для окклюзионных поверхностей использовать щетки.
- ▶ Unit Dose и тубик имеют оригинальную укупорку. Перед первым использованием обратить внимание на целостность оригинальной укупорки.

Рекомендуемый способ применения:

Внимание! Опасность перегрева при ненадлежащем применении.

- ▶ Следить за тем, чтобы в используемой полировальной чашке было достаточно материала.

Внимание! Опасность проглатывания при недостаточном отсасывании слюны.

- ▶ Работать только со слюноотсосом.

Применение пасты из стандартной банки

Указание: Каждая Unit Dose содержит достаточно материала для профилактической обработки. Каждую стандартную банку разрешается использовать только для отдельного пациента.

1. С помощью ушка снять со стандартной банки оригинальную укупорку и выбросить ее.
2. Вставить стандартную банку в соответствующий держатель.
3. Для наполнения внести полировальную чашку на малой скорости в профилактическую пасту и набрать материал.
4. Обрабатывать полировальной чашкой с пастой каждый зуб по 20 с на скорости от 3000 до 5000 об./мин.
5. Излишки пасты отсосать и попросить пациента выплюнуть их.

Применение пасты из тубика

Указание: После нанесения материала необходимо закрыть тубик, чтобы избежать высыхания материала.

1. При первом применении тубика с помощью ушка снять оригинальную укупорку и выбросить ее.
2. Нанести на блок для перемешивания достаточное количество материала.
3. Для наполнения внести полировальную чашку на малой скорости в профилактическую пасту и набрать материал.
4. Обрабатывать полировальной чашкой с пастой каждый зуб по 20 с на скорости от 3000 до 5000 об./мин.
5. Излишки пасты отсосать и попросить пациента выплюнуть их.

Состав

Пемза, глицерин, вода, ортофосфорная кислота (< 2%), вкусовые и ароматические вещества, присадки, фторид натрия (2,72%, соответствует содержанию ионов фторид 1,23%/12.300 частей на миллион)
Не содержит аспартама, клейковины, сахарина.
Содержит ксилитол.

Способ и сроки хранения

- Хранить при комнатной температуре (от 15 до 25 °C/от 59 до 77 °F)
- Не хранить в холодильнике!
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей!
- Не использовать по истечении срока годности!

Форма продажи:

Unit Dose

Упаковка содержит 200 отдельных порций по 1,8 г и предлагается со следующими вкусовыми оттенками и со следующей зернистостью:

| Mint | |
|-----------------------------|------------|
| Шлифовальная насадка fine | REF 220414 |
| Шлифовальная насадка medium | REF 220415 |
| Шлифовальная насадка coarse | REF 220416 |

Тубик

Упаковка содержит 1 тубик емкостью 75 мл и предлагается со следующими вкусовыми оттенками и со следующей зернистостью:

| Mint | |
|-----------------------------|------------|
| Шлифовальная насадка fine | REF 220417 |
| Шлифовальная насадка medium | REF 220418 |
| Шлифовальная насадка coarse | REF 220419 |

| Melon | |
|-----------------------------|------------|
| Шлифовальная насадка fine | REF 220423 |
| Шлифовальная насадка medium | REF 220424 |
| Шлифовальная насадка coarse | REF 220425 |