

## **ДИПЛЕН-ДЕНТА М**

Пленка полимерная стоматологическая самоклеящаяся двухслойная с метронидазолом.

Регистрационное удостоверение No ФСР 2008/02392,  
выдано ООО «Норд-Ост». Москва, РФ.

### **СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА**

1 кв. см пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА М толщиной 0,02-0,06 мм содержит метронидазола 0,03-0,05 мг.

### **СВОЙСТВА И ДЕЙСТВИЕ**

ДИПЛЕН-ДЕНТА М двухслойная пленка, состоящая из совмещенных гидрофильного и гидрофобного слоев. Предназначена для местного применения. Обладает широким спектром действия против вегетирующих в полости рта анаэробных бактерий чувствительных к метронидазолу. ДИПЛЕН ДЕНТА М гидрофильной (клеящей) стороной плотно фиксируется на влажной поверхности десны и слизистой оболочки и сохраняется в течение нескольких часов.

Пораженный участок герметично закрывается и изолируется от окружающей среды, исключается вторичное инфицирование, осуществляется активное и избирательное воздействие лечебного фактора на место поражения.

Наружный (гидрофобный) слой предотвращает выход компонентов пленки в полость рта и попадание ротовой жидкости в зону действия пленки.

Пленка прозрачна, что дает возможность наблюдать за динамикой патологического процесса, не снимая ее с области пораженного участка.

Применение пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА М при лечении различных инфекционных и воспалительных заболеваний полости рта и десен приводит к исчезновению или значительному снижению количества агрессивных видов анаэробных бактерий родов *Prevotella*, *Porphyromonas*, *Bacteroides*, *Fusobacterium*, *Peptostreptococcus*, *Actinomices*. В тяжелых случаях пародонтита, при наличии множественной антибиотикорезистентности целесообразно сочетание пленок ДИПЛЕН-ДЕНТА М с пленками ДИПЛЕН-ДЕНТА Л или ДИПЛЕН-ДЕНТА Х. В применении пленка очень проста, больные могут накладывать пленку самостоятельно, по курсу, предписанному врачом.

### **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

- заболевания слизистой оболочки полости рта и десен, вызванные анаэробными микроорганизмами;
- пролежни и изъязвления слизистой оболочки полости рта.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Перед началом лечения пленкой ДИПЛЕН-ДЕНТА М проводится снятие над и

поддесневых зубных отложений и кюретаж по показаниям. Аппликацию пленок проводят следующим образом: отрезают полоску пленки длиной 50 мм и шириной 10 мм (либо другого удобного размера) и накладывают клеещей стороной на десну. Как правило, первые 2-3 аппликации проводятся в клинических условиях с одновременным обучением больных технике их самостоятельного применения. Если не требуется специального наблюдения врача, больным для проведения данного этапа лечения предписывают накладывать пленку самостоятельно (предпочтительно на ночь): рекомендуются ежедневные аппликации пленки в 4 квадрантах после чистки зубов 1 или 2 раза в сутки.

## **РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ**

- Гингивит и пародонтит легкой степени. В большинстве случаев для ликвидации воспалительных явлений в тканях десен достаточно 5-8 аппликаций. Контрольные осмотры проводят через 1, 3, 6 и 12 месяцев после окончания курса лечения.
- Пародонтит средней степени тяжести. Курс лечения пленкой ДИПЛЕН-ДЕНТА М варьирует в пределах от 6 до 10 дней.
- Пародонтит тяжелой степени. Применение пленки производится в комплексе с другими пародонтологическими мероприятиями. Лечебная тактика определяется индивидуально для каждого пациента. Наибольшие трудности встречаются при лечении больных с хроническим пародонтитом в стадии обострения, когда помимо выраженной воспалительной реакции отмечается гноетечение из пародонтальных карманов, при лечении пародонтита у больных сахарным диабетом, а также при прогрессирующих юношеских пародонтитах с преобладанием *Actinobacillus actinomycetemcomitans*. В этих случаях до начала курса лечения дважды в сутки (после утренней и вечерней чистки зубов) с вестибулярной и оральной стороны на десну апплицируют пленку ДИПЛЕН-ДЕНТА Л или ДИПЛЕН-ДЕНТА Л. Такие процедуры, которые можно назвать предварительными, проводят в течение 3-5 дней в зависимости от состояния и самочувствия пациента. Как правило, этого достаточно для снятия острых воспалительных явлений, резкого уменьшения или прекращения гноетечения из пародонтальных карманов, что позволяет приступить к снятию над и поддесневых зубных отложений, удалению грануляций и проведению основного курса лечения. В процессе лечения помимо аппликации на десну рекомендуется введение нарезанной мелкими кусочками пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА М в пародонтальные карманы. Курс лечения пародонтита тяжелой степени составляет в среднем 17-20 дней. В ряде случаев хороший эффект достигается при чередовании ДИПЛЕН-ДЕНТА М с ДИПЛЕН-ДЕНТА Х или ДИПЛЕН-ДЕНТА Л. Чередование пленок различных марок эффективно при условии непрерывного применения пленки одного вида в течение не менее 6-8 дней.

## **ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

Катаральный гингивит и пародонтит легкой степени. Наблюдается стойкий клинический эффект лечения на протяжении 6 месяцев, сохраняющийся у отдельных

больных до одного года. Повторный курс назначается через 9-12 месяцев лечения. Пародонтит средней и тяжелой степени. Целесообразно применять пленку при первых признаках обострения.

### **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Побочного действия не наблюдалось, возможны аллергические реакции на компоненты препарата.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **УПАКОВКА**

В герметичной полиэтиленовой упаковке одна пленка размером 50x100 мм.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Следует хранить пленки в оригинальной упаковке. Оставшуюся после использования часть пленки ДИПЛЕН-ДЕНТА М снова вкладывают в упаковочный мешочек, вставляют в конверт и хранят в сухом, прохладном, защищенном от света месте. Не следует использовать пленку после истечения срока годности. Пленки с истекшим сроком хранения и с поврежденной упаковкой следует уничтожить. Пленку хранить в недоступном для детей месте.

### **Производитель препарата**

Пленку производит компания «НОРД-ОСТ», г. Москва, РФ.

### **СРОК ГОДНОСТИ УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

**2 года. Указан на упаковке. Отпуск безрецептурный.**