

Enhance®

Система для финишной обработки

# Финишная обработка и полировка за один шаг

С помощью системы финишной обработки Enhance® вы сможете удалять излишки реставрационного материала, проводить контурирование и финирирование просто изменяя силу нажима. Нажмите сильнее для удаления излишков материала. Ослабьте давление для проведения финишной обработки. С системой Enhance® вы всего за один шаг получите гладкую контурированную и естественно выглядящую поверхность. И все это только благодаря разной силе нажима.



# Проще. Быстрее. Впечатляющие результаты

Простота использования является одним из важнейших факторов при выборе системы финишной обработки для более чем 70% стоматологов. Поэтому мы разработали систему Enhance®.

Финишная обработка всего за один шаг? Нет ничего проще!

Нажмите сильнее для удаления излишков реставрационного материала и контурирования. Уменьшите нажим для получения естественной гладкой поверхности. Теперь нет необходимости менять инструменты, и вы можете сосредоточиться на лечении, быстрее достигая отличных результатов.



Удаление излишков реставрационного материала и контурирование




Финирование



Реставрация полости II класса с использованием ceram.x® SphereTEC™ one и финированием с помощью Enhance®

## Максимум блеска

После финишной обработки придайте реставрации зеркальный блеск, используя систему алмазных полиров Enhance® PoGo®.

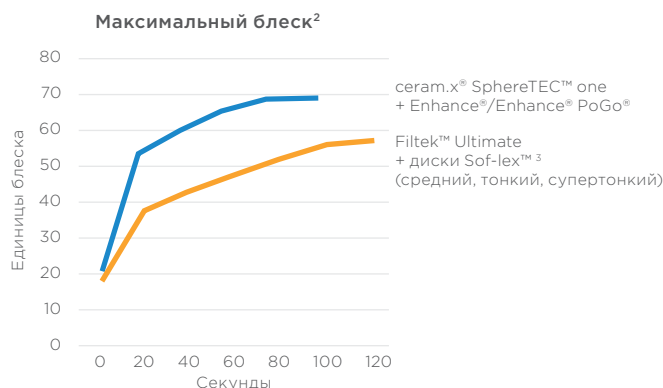

## Информация для заказа

### Наборы Enhance® Refill

30 дисков  
30 чашек  
30 конусов

624045X

624055X

624065X

### Набор Enhance® System Kit

624075

20 дисков, 10 конусов, 10 чашек Enhance® для финишной обработки, 1 полировочная паста Prisma® Gloss™ (стандартная), 1 полировочная паста Prisma® Gloss™ extra fine (со сверхмелким размером частиц).



### Рекомендации по использованию Enhance и Enhance PoGo:

- без воды
- 10 000 – 15 000 об./мин.
- без чрезмерного давления на инструмент
- **нельзя использовать с турбинными наконечниками (>20,000 об./мин.)**

### Dentsply Sirona

115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 6, «Немецкий центр промышленности и торговли», офис 10-04  
Телефон: +7 (495) 725-10-87  
Факс: +7 (495) 725-10-86  
www.dentsplysirona.com



1. Exevia: Dental Shuttle Q4, 2016, Германия.  
2. da Costa J, Ferracane JL, OHSU (Орегон Хелт & Сайенс Университи, США)  
3. Зарегистрированные торговые марки, не принадлежащие Dentsply Sirona.  
K79200250-02

© Dentsply Sirona. 06/2017