

ADHESOR™

Цинк-фосфатный цемент

Характеристика:

Двухкомпонентный цинкфосфатный цемент в виде порошка и жидкости.

Показания:

- 1) Подкладочный материал под амальгамные и композитные пломбы.
- 2) Материал для временных пломб.
- 3) Фиксация коронок и небольших мостовидных протезов.
- 4) Заполнение корневых каналов.

Противопоказания:

Материал не применяется в случае известной повышенной чувствительности по отношению к некоторым его составным частям.

Побочные эффекты:

При применении цемента в непосредственной близости пульпы необходимо покрыть дентин тонким слоем препарата из гидроокиси кальция.

Обработка (предназначенное для ручного смешивания):

Замешивание производится на стеклянной пластинке при помощи растирающей лопатки из нержавеющей стали при температуре 23+1°C. Для продолжения периода обработки рекомендуется замешивать цемент при температуре 20°C. Рекомендуется также проводить порционное перемешивание порошка с жидкостью.

а) Для подкладок и пломб:

Соотношение при замешивании:

По весу: 2,30 г порошка на 0,5 мл жидкости, то есть 2,30 г порошка на 0,80 мл жидкости.

По объёму: 2 мерных ложки порошка и 3 капли жидкости.

Время замешивания: 2–2,5 мин.

Время обработки: (с начала замешивания до момента отверждения) 4–4,5 мин.

Время затвердевания: (с начала замешивания до момента отверждения) 6–7 мин; окончательное оформление изготовленной прокладки или пломбы можно проводить непосредственно после их затвердевания.

б) Фиксация постоянных протезов:

Соотношение при замешивании:

По весу: 1,40 г порошка на 0,5 жидкости, то есть 1,40 г порошка на 0,80 г жидкости.

По объёму: 2 мерные ложки порошка и 5 капель жидкости.

Время замешивания: 60–90 сек.

Время обработки: (с начала замешивания до момента отверждения) 3–4 мин.

Время затвердевания: (с начала замешивания до момента отверждения) 6–8 мин.

Примечание:

При применении цемента в непосредственной близости пульпы необходимо прикрыть дентин тонким слоем материала из гидроокиси кальция. Состав жидкости и порошка на воздухе легко изменяется, поэтому производитель рекомендует обе бутылочки тщательно закрывать.

Предупреждение:

Порошок: H410 Чрезвычайно токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями. P273 Избегайте попадания в окружающую среду. Жидкость: H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P280 Пользуйтесь защитными перчатками/защитной одеждой/защитными очками/защитным щитком для лица.

Хранение:

В сухом и тёмном месте при температуре 5–25°C в хорошо закрытой упаковке.

Срок годности:

5 лет.

Упаковка:

ADHESOR (80г порошка + 55г жидкости), мерка для порошка.

ADHESOR порошок 80г, мерка для порошка.

ADHESOR жидкость 55г.

Цветовые оттенки:

№1 – белый.

№2 – жёлтый.