

Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ (Provicol/Provicol C/Provicol QM)

Инструкция по применению

ЕС Медицинское изделие

Разрешен к применению на территории РФ ФСЗ 2011/ 09580

Описание материала:

Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ представляет собой безэвгенольный цемент с гидроксидом кальция, легкий в обработке, не влияющий на отверждение пломбировочных и фиксирующих материалов на композитной основе.

Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ содержит гидроксид кальция для поддержания жизнеспособности зуба.

Показания к применению:

Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ является временным стоматологическим цементом для фиксации и закрытия небольших плоских полостей.

Противопоказания:

Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ содержит модифицированную канифоль. Следует отказаться от применения **Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ** при наличии гиперчувствительности (аллергии) к этому компоненту.

Целевая группа пациентов:

Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ разрешен к применению у всех пациентов без ограничений по полу и возрасту.

Характеристики материала:

Характеристики материала соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям данного целевого назначения, а также требованиям стандартов, распространяющихся на данное изделие.

Пользователь:

Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ должен использоваться профессионально подготовленным в области стоматологии специалистом.

Применение:

Провикол КМ (в дозаторах КвикМикс)

Перед первым применением технически допустима незначительная разница в уровне заполнения обоих отделений дозатора. Защитный колпачок дозатора снять и материал выдавливать до тех пор, пока его выход из обоих отверстий не будет равномерным. Надеть смесительную канюлю (тип 10). Отверстия в дозаторе и канюле для смешивания должны совпадать. Зафиксировать канюлю путем поворота на 90° по часовой стрелке. При выдавливании материал автоматически смешивается в канюле. Все дозаторы КМ имеют выдвижные поршни. Поршень можно вынуть из дозатора и вставить обратно. При этом находящиеся в дозаторе уплотнители не меняют положения. Это предотвращает контаминацию материала в дозаторе.

Провикол Ц (в картриджах)

Картридж с **Провиколом Ц** установить в диспенсер (тип 2) фирмы **VOCO** или аналогичный. Перед первым применением возможна незначительная разница в уровне заполнения обеих частей картриджа. В связи с этим заглушку картриджа удалить и материал выдавливать до тех пор, пока его выход из двух отверстий не будет равномерным. После этого установить на картридж смесительную канюлю (тип 6) и зафиксировать поворотом на 90°. Материал

выдавливается путем медленного и равномерного нажатия на поршень и, при этом, автоматически смешивается в правильной пропорции.

Установленная насадка (канюля) для смешивания предназначена только для однократного применения. После применения следует хранить картриджи (шприцы QM) плотно закрытыми. При повторном применении следует проверить выпускные отверстия и убедиться, что материал свободно выдавливается через них.

Указанные свойства продукта достигаются только при применении оригинальных смесительных канюль, включенных в поставку и предлагаемых в качестве комплектующих принадлежностей.

Провикол (в тубе)

Работа с **Провиколом** осуществляется при комнатной температуре (18 °C - 23 °C). При пониженной температуре (охлажденная стеклянная пластина) рабочее время увеличивается. Катализатор и основа Провикола смешиваются в соотношении 1 : 1. Для этого на блок для смешивания из плотной, не впитывающей бумаги/ пластмассы или на стеклянную пластину нанести одинаковые по длине полоски пастыосновы и пасты-катализатора. Обе пасты смешивать приблизительно в течение 20 с до получения материала однородной консистенции. Для смешивания применять шпатель из нержавеющей стали или пластмассы.

Нанесение материала:

Небольшое количество **Провикола/Провикола Ц/Провикола КМ** внести во временную коронку или мост и установить конструкцию на препарированный зуб. Рабочее время Провикола составляет прибл. 1,5 - 2 минуты, **Провикола Ц/ Провикола КМ** - около 1 минуты. Отверждение всех этих препаратов в ротовой полости занимает 4 - 6 минут. Излишки материала удалить через 3 - 5 минут после установки конструкции в ротовой полости.

Указания, меры предосторожности:

- При вскрытии пульпы или при незначительной толщине остатка дентина рекомендуется проведение соответствующих мероприятий по защите пульпы.
- Чувствительность культей зубов может быть снижена путем применения десенсибилизирующих средств перед временной фиксацией. Перед окончательной фиксацией необходимо полностью удалить данные препараты. При этом не использовать эвгенолосодержащие материалы! Для реставраций многоповерхностных и объёмных полостей, а также долгосрочных временных реставраций рекомендуется применение более твёрдого цемента.
- Наши указания и/или рекомендации не освобождают Вас от проверки поставляемых нами препаратов на их пригодность к использованию в соответствующих целях.

Дополнительные указания:

Только при применении **Провикола** в тубах культу зуба лучше немного смочить водой! Присутствие влаги (влажные культы) облегчает удаление временной конструкции. Остатки **Провикола/Провикола Ц/Провикола КМ** легко удаляются из коронки, если их обработать охлаждающим спреем.

Хранение:

Хранить при температуре от 4 °C до 23 °C. Не использовать после истечения срока годности.

Утилизация:

Материал необходимо утилизировать в соответствии с местными официальными предписаниями.

Обязательное извещение:

Обо всех серьезных побочных происшествиях, таких как смерть, серьезное ухудшение состояния здоровья пациента пользователя или других лиц в течение длительного или короткого периода времени, а также о серьезной угрозе общественному здоровью, которые произошли или могли бы произойти в связи с применением **Провикол/Провикол Ц/Провикол КМ**, следует сообщать в компанию VOCO GmbH и в компетентные органы.