



**Торговое название:** Endomax kit

**Описание продукта:**

Цемент для пломбирования корневых каналов

**Показания к применению:**

Пломбирование каналов всех групп зубов (с использованием гуттаперчевых штифтов).

**Состав:**

**Порошок:** гидрокортизон ацетат, наполнитель: дииодотимол, сульфат бария, оксид цинка, стеарат магния.

**Жидкость:** эвгенол, масло перечной мяты, анисовое масло)

**Способ применения:**

Зуб должен быть хорошо изолирован (с помощью ватных валиков или коффердама) После тщательной обработки канала, его дезинфекции с помощью антисептического раствора, с последующим промыванием и высушиванием бумажными штифтами, подготовить пасту.

Перед замешиванием встряхните порошок для обеспечения равномерного распределения однородной массы. Пасту готовят на блокноте или стеклянной пластине. Порошок и жидкость тщательно перемешивают до получения мягкой пасты (консистенция сметаны). Для получения хороших результатов рекомендуется смешивать 2 частей порошка (отмеренных мерной ложкой) с 3-6 каплями жидкости.

Приступить к заполнению канала с помощью каналонаполнителя и ввести в канал один или несколько предварительно приготовленных штифтов. Готовую пасту вводят двумя-тремя порциями в подготовленный корневой канал.

**Комплектация:**

1 шт x 15 г порошка

1 шт x 10 мл жидкости

1 шт ложка

1 шт блокнот для замешивания

1 шт x инструкция по применению

**Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Риск аллергии на любой из компонентов, особенно в случае контакта с деснами. Не использовать не по назначению.

**Меры предосторожности:**

Избегать длительного контакта с кожей, глазами и мягкими тканями. После контакта тщательно промойте водой. Не использовать со стоматологическими материалами на основе метилметакрилата. Не применять для фиксации композитных реставраций.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4 до +24° С.

**Срок годности :**

3 года с даты изготовления.

**Утилизация:**

Изделие не относится к опасным отходам. Утилизировать в соответствии с общепринятой медицинской практикой и применимыми местными, государственными и федеральными законами и нормативными актами. Класс опасности для медицинских отходов с учетом спецификации морфологического состава (в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами Российской Федерации 2.1.7.2790-10): Класс А

**Производитель:**

Queen Dental GmbH

Neue Straße 67, 99846 Seebach, Germany

Ню штрассе 67, 99846 Зеебах, Германия

Телефон: +49 36929 139999

E-mail: [sales@queendental.de](mailto:sales@queendental.de)