

Enamelast™ Fluoride Varnish

5%-й фтористый натрий, масляный лак

Описание продукта

Фтористый масляный лак Enamelast™ представляет собой ароматизированный, подслащенный ксилитом, 5% фторид натрия в полимерном носителе, поставляемый в шприце на 1,2 мл или в блистерной упаковке разовой дозы на 0,4 мл.

Для всех описанных продуктов перед использованием внимательно прочтите и усвойте все инструкции и паспорт безопасности.

Форма поставки

- Шприц для доставки объемом 1,2 мл
 - Наконечник SoftEZ™
- Разовая упаковка на 0,4 мл
 - Кисть для нанесения

Показания к применению/назначение

Фтористый масляный лак Enamelast представляет собой 5% фторид натрия в лаковом носителе, который вызывает механическую окклюзию дентинных канальцев при лечении гиперчувствительности зубов.

Противопоказания

- Не используйте для лечения пациентов с язвенным гингивитом или стоматитом.
- Не используйте средство для лечения пациентов с известной повышенной чувствительностью к ингредиентам, в том числе к канифоли (kolophonium). При появлении аллергической реакции, дерматита или сыпи обратитесь к врачу.
- Для пациентов или пользователей с аллергией см. документ о присутствующих в продукте аллергенах, доступный на веб-сайте www.ultradent.com. При возникновении аллергической реакции тщательно промойте область вмешательства водой и попросите пациента проконсультироваться с его лечащим врачом.

Предупреждения и меры предосторожности

- Используйте только рекомендованные наконечники.
- Насадки предназначены только для одноразового использования.
- Пациент, медработник и его ассистент должны носить защитные очки.
- В редких случаях сообщалось об отечной припухлости после применения фторирующего лака на обширном участке, а также о затруднении дыхания у детей, страдающих астмой. В этом случае тщательно почистите зубы, чтобы удалить пленку лака, и попросите пациента связаться со своим лечащим врачом.
- Некоторые пациенты могут испытывать тошноту после применения средства. Если тошнота не проходит, следует тщательно почистить зубы для удаления пленки лака.

- Не используйте более половины шприца 1,2 мл фтористого масляного лака на пациента за одно применение.
- Не проводите лечение с помощью других наружных средств для фторирования зубов в тот же день и предупредите пациента о необходимости воздерживаться от применения фторсодержащих средств в ротовой полости в течение 4 (четырёх) дней после лечения.
- Не снимайте колпачок со шприца или крышку из фольги с разовой дозы, пока не будете готовы к использованию.

Пошаговые инструкции

Подготовка

- Тщательно почистите зубы, отполируйте резиновой чашечкой или протрите зубы марлей перед установкой.
- Для шприца: Надежно прикрепите рекомендуемый наконечник для доставки и проверьте текучесть, цвет и консистенцию продукта перед нанесением, выдавив небольшое количество на бумагу для замешивания или марлю. Если выдавится прозрачная жидкость, уберите ее. При чрезмерном сопротивлении замените наконечник и повторите проверку.
- Для разовой дозы: Откройте блистерную упаковку, отогнув и сняв крышку из фольги. Используя одноразовую кисточку для нанесения, слегка перемешайте лак.

Использование

1. Сухой участок, подлежащий обработке.
2. Нанесите тонкий ровный слой фтористого масляного лака Enamelast на как можно большее количество поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Пациентам следует избегать чистки зубов щеткой и зубной нитью в течение 4–6 часов после лечения. Если есть возможность, подождите до следующего утра.
- Пациентам следует избегать горячей пищи или напитков, а также продуктов, содержащих алкоголь (например, напитки, средства для полоскания рта и т. д.) в течение 4–6 часов после лечения.
- Фтористый масляный лак Enamelast начнет отслаиваться при каждой чистке щеткой.
- Для максимального эффекта лак Enamelast можно наносить повторно каждые 3–6 месяцев.

Надлежащее обращение

Во избежание перекрестного загрязнения протирайте шприц между применениями дезинфицирующим средством средней активности и используйте одноразовые защитные чехлы. Если защитный чехол не используется, шприц следует рассматривать как одноразовый.

Хранение и утилизация

Утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами, инструкциями и нормами.

Прочая информация

Сообщите о любых серьезных инцидентах производителю и компетентному органу.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200