

# YPEEN™

## Альгинатный слепочный материал

### Характеристика:

ИПЕЕН является альгинатной оттисковой массой применяемой в стоматологической практике и ортодонтии.

### Соотношение при замешивании:

20 мл воды : 10 г порошка.

Сначала мерной ложкой отмерить воду и налить в чашку для замешивания. Порошок альгинатной оттисковой массы необходимо перед использованием тщательно встряхнуть. Затем порошок набирается из пластмассовой банки или пакетика приложенной мерной ложкой и вкладывается в чашку для замешивания. Воду с порошком тщательно перемешать пластмассовым шпателем путём растирания вдоль стен чашки для замешивания.

### Время замешивания:

30 сек.

### Время обработки:

2 минуты при температуре 23°C (включая время замешивания).

### Время затвердевания:

2,5 минуты при температуре 23°C (включая время замешивания).

### Дезинфекция:

В дезинфицирующем растворе, например ЙОДИЗОЛ, разбавленном в соотношении 1 : 10 (30 сек.) после промывки водой.

### Хранение оттиска:

Рекомендуется оттиск залить гипсом непосредственно после его получения, максимально его можно хранить 4 часа в среде со 100% влажностью.

### Формовочная масса:

Гипс (МРАМОРИТ, КОНВЕРТИН ХАРД).

### Примечание:

Для подготовки альгинатной оттисковой массы рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду при температуре около 23°C. В случае повышенной температуры или жёсткости воды время обработки и время затвердевания сокращается.

### Предупреждение:

H302 Вреден для здоровья при проглатывании. H312 Вреден для здоровья при попадании на кожу. H332 Вреден для здоровья при вдыхании. H319 Вызывает сильное раздражение глаз. H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей. H373 Может вызвать повреждение органов в результате длительного или

многократного воздействия. P270 При использовании данного продукта запрещается принимать пищу, пить и курить. P271 Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. P281 Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.

**Утилизация отходов:**

Пустая упаковка и не использованные остатки материала утилизируются обычным путём.

**Хранение:**

В сухом и тёмном месте при температуре от +5°C до +25°C в хорошо закрытой упаковке.

**Срок применения:**

2 года.

**Упаковка:**

800 г в пластмассовой ёмкости.

7 x 450 г, 1 x 450 г - в алюминиевых пакетах.