



ЭЛЕКТРОШПАТЕЛЬ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ с установкой температуры и сменными насадками ЭШЗ-01-«АВЕРОН»



РУ №ФСР 2009/05430 от 30.01.2024

**Руководство по эксплуатации
АВЕ 045.000.002 РЗ**

Нанесенная маркировка по безопасности:

	До начала работ внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации
==12В 1А	Указаны номинальные значения параметров электропитания

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство распространяется на Электрошпатель зуботехнический с установкой температуры и сменными насадками ЭШЗ-01-«АВЕРОН», ТУ 9452-004-41752545-2001, далее – **ЭШЗ**.

1.2 ЭШЗ предназначен для моделирования воском в стоматологических учреждениях.

1.3 Условия эксплуатации

окружающая температура	10...35°C
влажность при 30°C, не более	80%

1.4 Основные технические характеристики

диапазон температуры	40...220°C
электропитание	12В 1 А
электропитание (блок питания)	100-240В 50/60Гц
потребляемая мощность, не более	12 Вт
масса блока управления, не более	0,16 кг
масса блока питания, не более	0,15 кг
габариты, без блока питания, не более	65×100×50 мм
режим работы	продолжительный

1.5 Особенности

Ручка электрошпателя из твердых пород дерева, несъемная насадка “лопатка прямая”.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Остерегайтесь прикосновения к нагретой насадке и попадания расплавленного воска на кожу.


Исключите касания разогретой насадкой кабеля ручки **ЭШЗ** и провода блока питания.

Не разбирайте ручку **ЭШЗ**.

3 УСТРОЙСТВО и КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1 – Блок управления – 1 шт.
- 2 – Ручка ЭШЗ с несъемной насадкой (3) "лопатка прямая" РШ 5.0 ОЛД ТЮЛЬПАН – 1 шт.
- 4 – Кольцо силиконовое (установлено)
- 5 – Блок питания 12В/1А – 1 шт.
- 6 – Ручка регулятора
- 7 – Светодиод
- 8 – Зацепы

Руководство по эксплуатации АВЕ 045.000.002 РЭ.

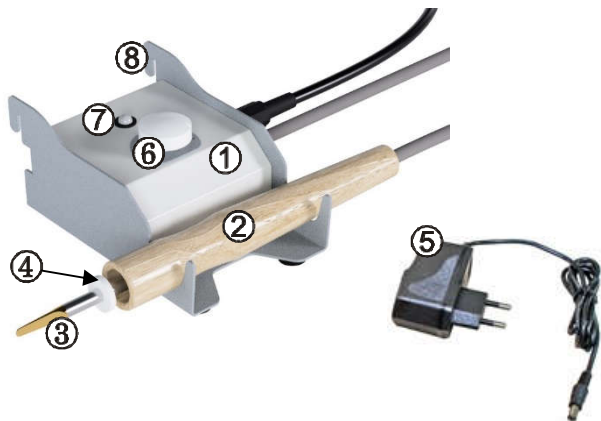

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

4 ПОДГОТОВКА

- Разместите блок управления (1) на ровной горизонтальной поверхности или навесьте на гнезда с шагом 60 мм передней панели СЗТ с помощью зацепов (8).
- Соедините разъем кабеля ручки ЭШЗ (2) с соответствующим разъемом блока управления (1).
- Соедините блок управления с блоком питания (5).



ВНИМАНИЕ!

Обеспечьте надежный контакт блока питания с сетевой розеткой.

5 РАБОТА

- Включите блок питания в сетевую розетку.
- Нагрев отображается светодиодом (7).
- Задайте температуру вращением ручки регулятора (6):
 - по часовой стрелке – увеличение температуры;
 - против часовой стрелки – уменьшение температуры.
- По окончании работ отключите блок питания от сетевой розетки.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование **ЭШЗ** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 40 до 50°C, относительная влажность до 100% при температуре 25°C.

6.2 **ЭШЗ** должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах при температуре от минус 40 до 40°C и относительной влажности до 98% при температуре 25°C. Не допускается хранение **ЭШЗ** совместно с кислотами и щелочами.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку корпуса **ЭШЗ** производите отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором, или жидкостью, растворяющей воск, кроме лицевой наклейки (при наличии). Не допускайте попадания жидкости внутрь **ЭШЗ**. По окончании очистки - протрите сухой мягкой тканью.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **ЭШЗ** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **ЭШЗ** не требуется.

9 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - **60 месяцев** (на блок питания – **12 месяцев**) с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на ручку **ЭШЗ** и ее кабель.

Средний срок службы - **6 лет**. По истечении срока службы Изготовитель не несет ответственность за обеспечение возможности использования **ЭШЗ** по назначению, включая его безопасность.

Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие Электрошпателя зуботехнического с установкой температуры и сменными насадками ЭШЗ-01-"АВЕРОН" требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему Руководству.

9.2 Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

10 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перечень неисправностей, методы их устранения:

Неисправность	Причины	Методы устранения
Отсутствие индикации и нагрева насадки ручки ЭШЗ	Блок питания ненадежно подключен к сети	Проверить надежность подключения
	Неисправный блок питания	
	Поврежден/неисправен кабель блока питания	
	Неисправный блок управления	

Примечание ☎ - если дефект не устранен, то обратитесь к продавцу или в ближайшее представительство АВЕРОН

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО" www.averon.ru

Юр. адрес: Россия, 620146, Свердловская обл.,

г.о. город Екатеринбург,

г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.127, помещ. 1,

тел.: +73433111121

feedback@averon.ru

Адрес производства: Россия, 620902, Свердловская

обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Николы Тесла, стр.4

Бесплатный звонок по РФ

88007001220

Сервис-центр:

бесплатный звонок по РФ

88007001102

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

1.0 ОЛД	Зав.№
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Мобильное Приложение АВЕРОН:

