

Руководство по эксплуатации

Лак покрывной противокариесный фторсодержащий «Флюорофил» по ТУ 9391-033-10614163-2002.

РУ № ФСР 2007/00677 от 22.10.2012 г.

Назначение

Лак стоматологический фторсодержащий «Флюорофил» предназначен для получения плёночного покрытия на поверхности эмали зубов с целью местного введения фтора в её поверхностные слои для повышения резистентности, а также при гиперстезии твёрдых тканей зубов. Лак «Флюорофил» применяется для:

- профилактики кариеса у детей и подростков;
- снятия симптомов гиперчувствительности зубов, вызванных дефектами твёрдых тканей;
- снижения болевой чувствительности в зубах, обточенных под коронку.

Основные свойства

«Флюорофил» представляет собой прозрачную вязкую жидкость светло-жёлтого цвета с хвойным запахом.

Лак «Флюорофил» образует тонкую бесцветную плёнку, которая удерживается на эмали зуба до 24 часов. Фторсодержащий компонент, находящийся в растворенном состоянии, обеспечивает диффузию иона фтора из образующейся плёнки в эмаль зуба и тем самым достигается максимальный противокариесный эффект.

Противопоказания к применению

Противопоказаний не выявлено.

Способ применения

Нанести лак на высушенную эмаль зубов при помощи ватного шарика или кисточки, просушить потоком воздуха в течение 2-3 минут. Полученная плёнка сохраняется на эмали зубов до 24 часов и легко удаляется при помощи зубной щётки. Как профилактическое средство препарат применяют у детей в возрасте 7-14 лет 3 раза с интервалом 6 месяцев. При гиперстезии твёрдых тканей «Флюорофил» нанести на отдельные пораженные зубы 1-2 раза в неделю, курс лечения составляет 4 аппликации. При необходимости повторяют курс лечения через 6-12 месяцев.

Форма выпуска

Лак (флакон) — 10 мл.; Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Условия хранения

хранить при температуре от +4 °С до +25 °С в сухом прохладном месте.

Утилизация отходов:

Отходы после использования «Флюорофил» в виде остатков лака, пустой тары утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Срок годности: 2 года.

Изготовитель

ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru