

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

комплекта пластин саморассасывающихся на основе природных полисахаридов для лечения воспалительных заболеваний десен и тканей пародонта

КП-«ПЛАСТ» АНТИМИКРОБНЫЕ по ТУ 9391-072-45814830-2002

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Комплект пластин саморассасывающихся на основе природных полисахаридов для лечения воспалительных заболеваний десен и тканей пародонта **КП-«ПЛАСТ» АНТИМИКРОБНЫЕ** (далее по тексту – пластины **КП-«Пласт» антимикробные**) предназначен для профилактики и лечения воспалительных заболеваний пародонта при гингивите и пародонтите.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

КП-«Пласт» антимикробные – двухслойные пластины, состоящие из гидрофильного и гидрофобного (метронидазол и хлоргексидин) слоя.

Хлоргексидин оказывает быстрое и сильное бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии. Сочетание хлоргексидина с метронидазолом эффективно в отношении анаэробных бактерий, колонизирующих ротовую полость.

Применение пластин позволяет пролонгировано поддерживать необходимую терапевтическую концентрацию антимикробных веществ в пораженных тканях пародонта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Перед началом лечения провести снятие над- и поддесневых зубных отложений и кюретаж по показаниям. Отрезать необходимый фрагмент пластины и наложить клеящей (гидрофильной) стороной на десну. Гидрофильная сторона плотно фиксируется на влажной поверхности десны и слизистой оболочки в течение нескольких часов. Гидрофобная сторона предотвращает выход лечящих компонентов пленки в полость рта, что обеспечивает активное и избирательное воздействие лечебного фактора на место повреждения. Если не требуется специального наблюдения врача, пациенту рекомендуется накладывать пленку самостоятельно по курсу, предписанному врачом (1-2 раза в сутки), предпочтительно на ночь после чистки зубов.

Пластины **КП-«Пласт» антимикробные** применяют курсом до 10 аппликаций.

При необходимости курс лечения повторить через 10 дней.

ФОРМА ВЫПУСКА

Пластина (5 см x 10 см)	- 2 шт.
Этикетка-обертка	- 2 шт.
Коробка-инструкция	- 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом прохладном, темном месте при температуре от +5°C до +10°C. Срок годности – 2 года. **Избегать попадания влаги!**

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30°C до +30°C.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества продукции, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки пластины **КП-«Пласт»** **антимикробные** и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00994 от 23.11.2017 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке.