

Русский

Описание

Fluor Protector - фторсодержащий защитный лак для снятия чувствительности и профилактики кариеса.

Область применения

Защита зубов

Состав

1 г Fluor Protector содержит:

Bis (4-[2- (дифторгидроксисилил) этил] - 2 - метоксициклогексил}

[N,N-(триметилгексан - 1,6 - ди)дикарбамат] (9 мг) (фторсилан).

Это соответствует 1 мг фтора.

Вспомогательные компоненты: этилацетат, изопентилпропионат, лак, образующий полимочевину.

Показания

- Лечение гиперчувствительных шеек зубов
- Повышение резистентности эмали
- Долгосрочная профилактика кариеса

Противопоказания

При известной аллергии на один или несколько компонентов от применения Fluor Protector следует отказаться.

Побочное действие

При контакте с десной может быть кратковременное ощущение жжения. В отдельных случаях не исключается гиперчувствительная реакция (аллергия). Проглатывание частиц лака по состоянию знаний на сегодняшний день безвредно.

Применение

Fluor Protector предназначен для профессионального нанесения врачом-стоматологом, гигиенистом или ассистентом. Fluor Protector можно использовать для пациентов любой возрастной группы. Как правило, нанесение Fluor Protector проводится один раз в полгода. В рамках интенсивного лечения временной интервал нанесения может быть короче.

Содержимого ампулы хватает на полное покрытие верхней и нижней челюсти у 2 – 3 пациентов.

Содержимого VivAmpoule хватает на полное покрытие верхней и нижней челюсти у 1 пациента.

Шаг за шагом

1. Тщательно очистить поверхность зубов.
2. Обеспечить сухость с помощью ватных тампонов и струи воздуха.
3. Открыть VivAmpoule (с помощью встроенного приспособления для открывания), обычную ампулу открыть прилагающимся вспомогательным инструментом.
4. Нанести тонкий слой лака с помощью подходящего аппликатора одноразового использования, например, Vivabrush или кисточки; зубная нить для аппроксимальной поверхности.
5. Равномерно распределить и высушить лак, при желании для этого можно использовать воздух.
6. Через 1 минуту удалить ватные тампоны .
7. Не промывать рот после нанесения Fluor Protector.

Совет для пациентов

После нанесения Fluor Protector в течение 45 минут нельзя ни есть, ни чистить зубы.

Рекомендация

По причине испаряемости рекомендуется после открытия VivAmpoule или обычной ампулы Fluor Protector использовать быстро.

Меры предосторожности

Легко воспламеняется.

Продукт содержит этил ацетат.

Держать вдали от источников тепла.

- **Случайные капли лака сразу же стирать, иначе могут остаться пятна!**
- **Не должен использоваться вместе с синтетическими брекетами.**

Избегать контакта с водой или водными очищающими растворами.

При случайном попадании на поверхности для удаления лака в течение первых 12 часов подходит ацетон или этилацетат.

Внимание: в каждом случае заранее проверить устойчивость покрытия мебели к растворителям! Позже лак можно удалить только механическим образом.

Условия хранения

- Хранение при 2–28 °С.
- Срок хранения: см. срок годности (в случае неоткрытой оригинальной упаковки).
- Не использовать по истечении срока годности.

Хранить в месте, недоступном для детей!

Для использования только в стоматологии

Продукт разработан для применения в стоматологии и подлежит использованию только в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности за применение в иных целях или использование, не соответствующее инструкции. Кроме того, потребитель обязан под свою ответственность проверить продукт перед его использованием на соответствие и возможность применения для поставленных целей, если эти цели не указаны в инструкции.