

Рекомендация по применению

Материал стоматологический для снятия гиперчувствительности Зубов «Сенсидент» по ТУ 9391-048-10614163-2011

РУ № ФСР 2011/12615 от 20/12/2011 г.

Назначение

«Сенсидент» - готовый к применению гель предназначен для:

- быстрого снятия симптомов гиперчувствительности зубов, вызванной дефектами эмалевого покрытия, эрозией твёрдых тканей, при оголении пришеечной части коронки зуба и стирании зубов;
- снижения неприятных ощущений в зубах, вызванных чувствительностью при отбеливании;
- снижения болевой чувствительности в зубах, обточенных под коронку.

Состав и основные свойства

«Сенсидент» выпускается в формате геля готового к применению. Основным действующим веществом являются соли калия, которые блокируют передачу нервных импульсов в дентинные каналца. После нанесения на обрабатываемую поверхность гель «Сенсидент» не стекает, не раздражает ткани полости рта, не токсичен, не окрашивает зубы, не содержит в своем составе вредных веществ, не вызывает аллергических реакций.

Противопоказания к применению

Противопоказаний не выявлено.

Способ применения

1 этап Очистить зубы от зубного налёта.

2 этап Нанести небольшое количество геля на ватную палочку или микроапликатор и аккуратно втереть в чувствительную зону зуба. Выдержать в течение 30-40 секунд, а затем удалить с обработанной поверхности. Гель можно наносить как на сухую, так и на влажную поверхность зуба. В течение 10 — 15 минут после обработки, необходимо воздержаться от приёма пищи и жидкости.

Форма выпуска

Гель во флаконе-капельнице – 10 г.; Рекомендация по применению — 1 шт.

Условия хранения и транспортирования

Хранить при температуре от +4°C до +25°C в сухом прохладном месте.

Утилизация отходов:

Отходы после использования «Сенсидент» в виде остатков геля, пустой тары утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

Срок годности: 18 месяцев.

Изготовитель

ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.

E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru