

2. GINGIFAST ELASTIC

НЕПРЯМАЯ ТЕХНИКА


Наносится непосредственно на гипсовую модель и рекомендуется для создания десневых масок в случае наличия естественных опор.

Материалы: Gingifast Elastic, Zetalabor, Elite Base, Elite Rock.

Мастер-модель



Ключ из Zetalabor

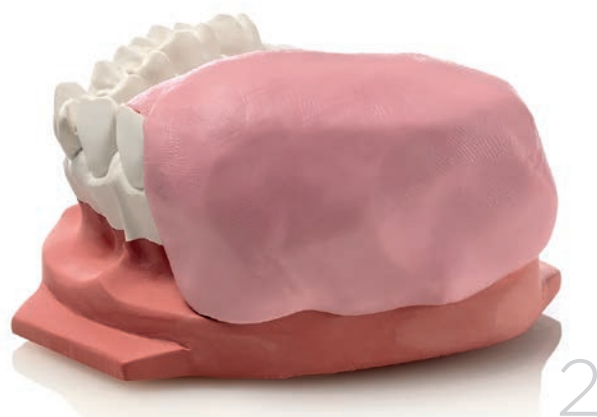

Удаление ключа



Формирование штампиков



4



Создание отверстий для введения силикона
и нанесение сепаратора на ключ




5

Повторная установка ключа на мастер-модель



6


Введение Gingifast Elastic внутрь ключа

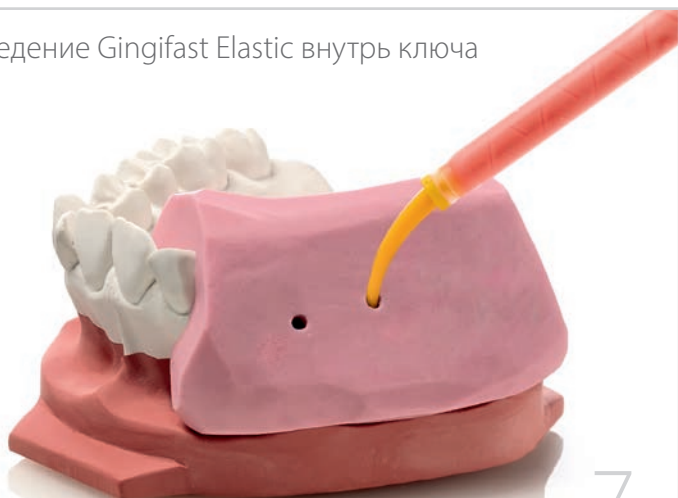

7



Завершение введения Gingifast Elastic
(материал вытекает из выходных отверстий)

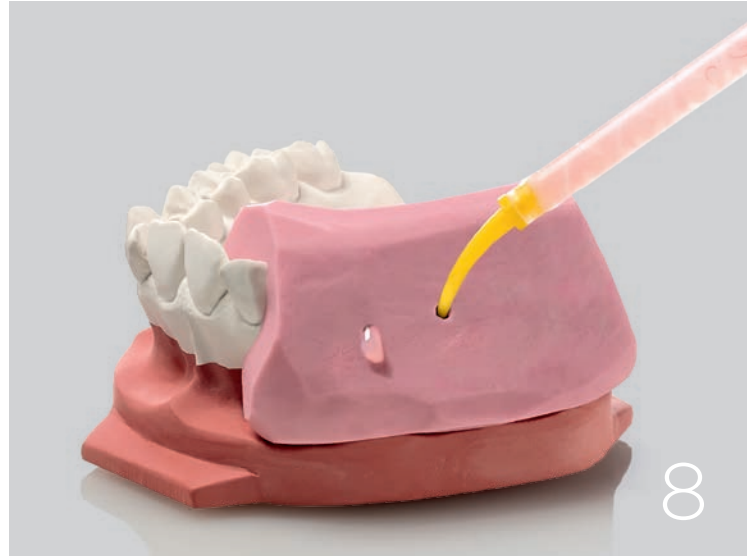

Удаление ключа
(выходные отверстия видны на десневой
части) и последующая финишная
обработка десневой части, устранение
выходных отверстий



КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

