

Variolink® Esthetic Try-In Paste

[ru] Инструкция по применению

Водорастворимая паста для примерки Try-In на глицериновой основе

Date information prepared:
2023-11-13/Rev. 0
web



Manufacturer:
Ivoclar Vivadent AG
Bendlerstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclar.com

ivoclar

Русский

Описание

Пасты Variolink® Esthetic Try-In – это водорастворимые глицериновые пасты. С помощью примерочных паст Try-In имитируется цвет цельнокерамической реставрации (виниры, вкладки типа Inlay, Onlay, коронки и мостовидные протезы), которая должна быть зафиксирована на композит Variolink Esthetic. По прозрачности и цвету пасты Try-In соответствуют полимеризованному (!) фиксирующему композиту Variolink Esthetic

Цвета

Variolink Esthetic Try-In выпускается в следующих шести оттенках:

Цвет	Эффект
Light +	более светлый / беловатый
Light	✓
Neutral	нет
Warm	✓
Warm +	более темный /желтоватый
White opaque	Маскировка измененных в цвете твердых тканей зуба

Пасты Try-In слегка отличаются по цвету от соответствующих цветов не отвержденного фиксирующего композита Variolink Esthetic, поскольку он приобретает свой окончательный цвет только после полимеризации. Таким образом, пасты Try-In по своему цвету соответствуют полностью полимеризованному фиксирующему композиту при той же толщине слоя.

Состав

Примерочная паста Variolink Esthetic содержит глицерин, минеральные и неорганические наполнители.

Побочное действие

Гигроскопичные пасты Try-in создают движение жидкости в дентинных канальцах и в результате могут вызывать кратковременную болевую чувствительность у пациентов. Поэтому примерку при необходимости следует выполнять под анестезией или после десенсибилизации с помощью десенситайзера.

Взаимодействие с другими материалами

Перед постоянной фиксацией тщательно смыть пасту Try-In с реставрации и зуба. В противном случае может быть нарушено сцепление между реставрацией и Variolink Esthetic.

Применение

- Имитация цвета с помощью паст Try-In всегда должна производиться перед высушиванием зуба, поскольку в результате высушивания ткани зуба на время становятся светлее.
- После выбора желаемого цвета поместить небольшое количество пасты Try-In на реставрацию. Аккуратно установите реставрацию без давления. Если примерка реставрации затруднена, проверить внутреннюю поверхность реставрации и проксимальные области на наличие мешающих контактов. Ни в коем случае не пытаться примерить реставрацию с применением большого физического усилия (опасность поломки реставрации!).

Указание:

- Проверку окклюзии с хрупкими керамическими конструкциями нужно проводить с особой осторожностью или после того, как реставрации были предварительно зафиксированы, так как существует риск их поломки.
- Примерочные пасты Try-In водорастворимы и могут быть легко удалены с реставрации промыванием в проточной воде или в ультразвуковой ванночке. Обратите внимание на тщательную очистку и просушивание реставрации.
- Ткани зуба тщательно промыть водным спреем.
- Затем выполняется постоянная фиксация реставрации на Variolink Esthetic (см. инструкцию к Variolink Esthetic).

Условия хранения

- Пасты Variolink Esthetic Try-in не использовать после окончания срока годности.
- Температура хранения 2–28 °C.
- Срок годности: см. на шприце или упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте! Для использования только в стоматологии!

Этот материал разработан исключительно для применения в стоматологии и должен использоваться строго в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности в случае использования материала не по инструкции или в непредусмотренной области применения. Потребитель несет собственную ответственность за тестирование материала на пригодность его применения для любых целей, не указанных явно в инструкции. Описания и приведенные данные не являются гарантией свойств.