

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
набора гелей для отбеливания, реминерализации и фторирования эмали зубов  
**«БЕЛАГЕЛЬ®»**  
по ТУ 9391-050-45814830-2004  
**размягчающего геля**  
**«БЕЛАГЕЛЬ®»-Р**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Набор гелей для отбеливания, реминерализации и фторирования эмали зубов «Беллагель»-Р (далее по тексту – гель «Беллагель»-Р) предназначен для выявления и размягчения зубного камня при его удалении с подвижных зубов при заболеваниях пародонта.

**СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА**

Специфические свойства препарата обусловлены содержащейся в нем кислотой, которая частично растворяет соли, образующие зубной камень. Это позволяет меньше травмировать твердые ткани зуба и слизистую, чем при снятии камня обычным способом.

Эфирные масла, входящие в состав геля «Беллагель»-Р, дают ощущение свежести, а окраска зубного налета в синий цвет контрастирует с эмалью и слизистой оболочкой полости рта, что позволяет врачу проконтролировать свою работу.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

**ВНИМАНИЕ:**

*Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

Изолировать зубы от слюны. Выдавить из шприца необходимое количество геля строго на зубные отложения, избегая попадания на слизистую. Выдержать 3-5 мин, смыть водой, затем снять зубной камень. При необходимости процедуру можно повторить.

**ФОРМА ВЫПУСКА**

Гель (шприц)	- 5 мл
Игла изогнутая	- 5 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	-1 шт.

Допускается выпуск геля «Беллагель»-Р другой комплектности.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Хранить в сухом темном месте в плотно закрытых шприцах при температуре **от + 5°C до +25°C**.  
Срок годности – **3 года**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30°C до +30°C.

**ВНИМАНИЕ:**

*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.*