



Всю продукцию АО «ОЭЗ «ВладМиВа» можно приобрести в интернет-магазине

tdvladmiva.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Жидкости «ТЕМПОФИКС®»

по ТУ 9391-106-45814830-2007

(материал стоматологический для временной фиксации несъемных ортопедических конструкций)

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Жидкость «Темпофикс» (далее по тексту – жидкость «Темпофикс») предназначена для размягчения и растворения цемента временной фиксации на основе оксида цинка (например, «Темпофикс» эвгенольный, «Темпофикс» безэвгенольный, «Ортофикс-Аква»-К).

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

В состав жидкости входит гидроокись калия, неоиногенное ПАВ, стабилизатор эмульсии и вода.

Жидкость «Темпофикс» размягчает и растворяет слой временного цемента, облегчает подготовку ортопедической конструкции для постоянной фиксации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

Ортопедическую конструкцию с остатками временного цемента промыть водой и поместить в емкость с жидкостью «Темпофикс» так, чтобы конструкция была полностью покрыта раствором. В течение 10-15 минут слой цемента временной фиксации толщиной до 25 мкм размягчается и растворяется.

Через 10-15 минут конструкцию извлечь из раствора жидкость «Темпофикс» с помощью пинцета, промыть водой и удалить остатки цемента используя пистолет вода/воздух.

Если после обработки на поверхности конструкции будут видны остатки цемента (места, где толщина слоя временного цемента превышала 25 мкм), его можно легко удалить инструментом, т.к. под действием раствора жидкость «Темпофикс» цемент размягчается. Для того чтобы сократить время обработки конструкции, можно использовать ультразвуковую установку.

После удаления временного цемента конструкция готова для постоянной фиксации.

ФОРМА ВЫПУСКА

Жидкость (флакон) - 125 мл или 0,5 л

Инструкция по применению - 1 шт.

Картонная упаковка - 1 шт.

Допускается выпуск жидкости «Темпофикс» другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре от +5°C до +25°C.

Избегать попадания прямых солнечных лучей!

Срок годности - 2 года.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30°C до +30°C.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки жидкости «Темпофикс» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.