

Tempron

ПЛАСТМАССА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК И МОСТОВ

Для использования только профессиональными стоматологами и только в целях, описанных ниже.

ПОКАЗАНИЯ

Для изготовления временных коронок, мостов и протезов.

Для заполнения промежутков между зубами, там, где это необходимо.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказан пациентам, имеющим чувствительность к акриловым пластмассам. При появлении аллергических реакций, обратитесь к врачу соответствующей специализации.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

А: КОРОНКИ

1. ПОДГОТОВКА

а) Заполните дефекты зуба GC Cavition или другим подходящим временным пломбировочным материалом.

б) Снимите оттиск с помощью густо замешанного (т. е. с использованием меньшего количества воды, чем рекомендовано в инструкции) альгинатного оттискного материала.

Заверните оттиск во влажную марлю, чтобы он не высох и не искривился.

в) Отпрепарируйте зуб, на который будет одеваться коронка.

г) Прорежьте V образные канавки от десневой до щечной и язычной стороны предварительно снятого оттиска, по которым будет вытекать излишняя пластмасса.

2. ЗАМЕШИВАНИЕ

а) Стандартное соотношение порошок/ жидкость составляет 1.0 г / 0.5 мл (порошок – до первого деления мерного стаканчика, жидкость – до первого деления мерной пипетки).

Замечание:

Для уменьшения усадки используйте как можно меньшее количество жидкости.

б) Поместите необходимое количество жидкости в чашку для замешивания, и постепенно добавляйте соответствующее количество порошка. Замешивайте в течение 20- 30 секунд.

3. НАНЕСЕНИЕ

а) Заполните полученной кремообразной массой подготовленный оттиск и надежно установите его на место.

б) Через 3 минуты удалите оттиск изо рта, так, чтобы на зубе осталась пластмасса в тестообразном состоянии.

в) Снимите с зуба коронку из еще не полностью затвердевшей пластмассы и погрузите ее в теплую воду (с температурой около 50 °С). Рекомендуется быстро погружать и вынимать ее из воды несколько раз, чтобы предотвратить чрезмерную усадку.

г) Срежьте лишнюю пластмассу, затем отполируйте готовую коронку.

д) Зацементируйте коронку с помощью GC Freegenol или другого подходящего временного фиксирующего цемента.

В: МОСТЫ

1. ПОДГОТОВКА

- а) Выберите подходящий искусственный зуб и зафиксируйте его между опорными зубами, используя подходящий воск. Проверьте прикусные соотношения.
- б) Снимите полный оттиск, используя альгинатный оттисковый материал. Осторожно удалите мостик и заверните оттиск во влажную марлю.
- в) Соответствующим образом подготовьте опорные зубы. Последующие процедуры проводятся, как описано выше для коронок (раздел А; пункты 1- 3) .

ХРАНЕНИЕ

Храните в прохладном месте, недосягаемом для прямых солнечных лучей.
(Гарантированный срок годности – 3 года).

УПАКОВКА

Упаковка 1- 1 содержит:
100 г порошка, 100 г жидкости, аксессуары.

ВНИМАНИЕ

1. Жидкость является летучим и огнеопасным веществом. Закрывайте бутылочку сразу же после использования и держите ее вдали от источников открытого пламени.
2. В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза водой и обратитесь за медицинской помощью.
3. Не рекомендуется использование оттискового материала на основе полисульфидной резины.