

# UltraEZ™

## Гель для снятия чувствительности

### Описание продукта

Гель для снятия чувствительности UltraEZ™ представляет собой уникальный липкий вязкий гель с замедленным высвобождением, содержащий 3% нитрата калия и 0,11% ионов фторида в пересчете на массу. Гель UltraEZ предназначен для использования в изготовленных на заказ капках, одноразовых капках или предварительно заполненных одноразовых капках.

Перед использованием внимательно прочитайте и уясните инструкции для всех перечисленных продуктов, а также всю информацию в паспорте безопасности.

### Форма поставки

- Капы UltraFit™
- Шприц для доставки объемом 1,2 мл
  - Прозрачный наконечник Straight Mac™ с отрывной крышкой

### Показания к применению/назначение

Гель для снятия чувствительности UltraEZ представляет собой пленковидный лак для чувствительных зубов, который герметизирует дентинные каналы обнаженного дентина и других областей, где чувствительность вызывает беспокойство. Продукт используется стоматологом в кабинете или предоставляется пациенту для лечения чувствительности дентина в домашних условиях.

### Противопоказания

- Не предназначен для беременных и кормящих женщин.
- Не предназначен для пациентов, которые могут глотнуть или вдохнуть капю.
- Не предназначен для использования пациентами младше 6 лет без консультации с лечащим врачом.
- Для пациентов или пользователей, имеющих проблемы с аллергией, см. документ о присутствующих в продукте аллергенах, доступный на веб-сайте [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com). При возникновении аллергической реакции тщательно промойте область вмешательства водой и попросите пациента проконсультироваться с его лечащим врачом.

### Особые указания и меры предосторожности

- Если возникнут какие-либо проблемы, прекратите лечение и сообщите об этом стоматологу.
- Продукт следует всегда беречь от воздействия тепла и (или) солнечного света.
- Излишки материала при введении и остатки при удалении следует удалить с помощью зубной щетки и прополоскать рот. НЕ глотать.

## **Пошаговые инструкции**

### **Использование — предварительно заполненная капа UltraFit**

1. «U» — верхняя капа, «L» — нижняя капа. Достаньте из упаковки.
2. Установите капу на зубы.
3. Плотно прикусите, а затем осторожно в течение 2 секунд высасывайте воздух из капы. Не прижимайте капу к зубам, так как она прижимает гель к деснам.
4. Снимите внешнюю капу, оставив на зубах белую внутреннюю капу.
5. При необходимости повторите эти действия с противоположной зубной дугой.
6. Носите от 15 минут до 1 часа в день или по указанию врача.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Не ешьте, не пейте и не используйте табачные изделия после установки кап. Не используйте капу на ночь.

### **Использование — изготовленные на заказ капа / элайнер / капа без предварительного заполнения UltraFit™**

1. Изготовьте капу в соответствии с потребностями пациента. Если у пациента уже есть изготовленная на заказ капа для отбеливания, гель UltraEZ можно загрузить в эту капу и использовать в ней.
2. Гель UltraEZ выпускается в шприцах с разовой дозой 1,2 мл. На полную зубную дугу следует использовать примерно от 1/3 до 1/2 содержимого шприца. Если вы используете изготовленные на заказ капу или элайнер для лечения локальной чувствительности, поместите гель в пораженные участки и небольшое количество геля в область моляров для удержания капы на месте.
3. Продолжительность и количество ношений капы зависит от состояния пациента и рекомендаций врача. Время лечения может составлять от 15 минут до 1 часа или в зависимости от того, что врач сочтет целесообразным.

### **Очистка — изготовленные на заказ капа / элайнер / капа без предварительного заполнения UltraFit**

1. Сразу после снятия капы пациент должен почистить зубы и ополоснуть их водой, чтобы удалить весь оставшийся гель. НЕ глотайте раствор во время полоскания. Вымойте изготовленные на заказ капу или элайнер и храните в контейнере для хранения капы. Утилизируйте капу UltraFit. При каждом применении следует использовать свежий гель.

## **Хранение и утилизация**

Утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами, инструкциями и нормами.

## **Прочая информация**

Сообщите о любых серьезных инцидентах производителю и компетентному органу.  
[www.ultradent.com](http://www.ultradent.com) / 1-800-552-5512 / 801-572-4200