

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
материала оттискового силиконового стоматологического
«БЕЛАСТ®»
по ТУ 9391-074-45814830-2002
(универсального катализатора)

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Материал оттисковой силиконовой стоматологической «Беласт» (универсальный катализатор) (далее по тексту – универсальный катализатор «Беласт») предназначен для отверждения (вулканизации) оттисковых силиконовых материалов конденсационного типа «Беласт» высоковязкий, «Беласт» средневязкий, «Беласт» низковязкий.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Универсальный катализатор «Беласт» - универсальный гелеобразный катализатор для конденсационных силиконовых материалов при получении точных оттисков твердых и мягких тканей протезного поля.

При смешивании силиконовых материалов («Беласт» высоковязкий, «Беласт» средневязкий, «Беласт» низковязкий) с гелем-катализатором образуется эластичный вулканизат.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ:

Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.

Дозировка катализатора осуществляется в соответствии с прилагаемыми инструкциями по применению основного материала.

Рабочее время и время вулканизации оттиска зависит от количества геля-катализатора. Увеличение количества катализатора и повышение температуры ускоряют отверждение силиконовой массы, а уменьшение количества катализатора и понижение температуры замедляют.

После использования геля-катализатора тубу тщательно закрыть.

ФОРМА ВЫПУСКА

Катализатор (туба)	- 60 мл
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск универсального катализатора «Беласт» другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом, защищенном от света месте в плотно закрытой таре при температуре от **+5°C до +25°C**.

Срок годности - **3 года**.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от **-30°C до +30°C**.

ВНИМАНИЕ:

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.

Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем для данной продукции.

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.

О случаях выявления неблагоприятных событий (инцидентов), не указанных в инструкции по применению просьба сообщать производителю.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки универсального катализатора «Беласт» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11999 от 23.10.2017 г.