

Ultra-Etch™ 35%-ная фосфорная кислота

Описание продукта

Ultra-Etch™ и Opal Etch™ представляют собой 35%-ные протравочные растворы фосфорной кислоты с оптимальной вязкостью. Текучесть обеспечивает точное внесение, включая окклюзионные канавки, но при этом является достаточно вязкой, чтобы предотвратить растекание. Протравочные растворы Ultra-Etch и Opal Etch самоограничиваются по глубине травления (средняя глубина 1,9 мкм при 15-секундном травлении). Они не содержат глицерина и предназначены для быстрого и полного удаления при ополаскивании.

Перед использованием всех описанных продуктов внимательно прочтите и поймите все инструкции и информацию SDS.

Форма(ы) доставки

- Шприц для внесения 1,2 мл и насадки для внесения
 - Синяя насадка Micro™
 - Насадки-кисти Inspiral™
- Шприц IndiSpense™

Показания к применению/целевое назначение

Используется для травления эмали и дентина или для подготовки поверхностей к бондингу или внесению цементов.

Противопоказания

Для пациентов или пользователей, страдающих аллергией, обратитесь к документу об аллергенах продукта, доступному по адресу www.ultradent.com. Если наблюдается аллергическая реакция, тщательно промойте пораженный участок водой и попросите пациента проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Предупреждения и меры предосторожности

- Избегайте контакта с мягкими тканями.
- При попадании средства на какие-либо мягкие ткани немедленно промойте участок большим количеством воды.
- Перед нанесением протравочного геля на участки прилегающие к поверхности пульпы их следует изолировать.
- Пациенты и специалисты-стоматологи должны носить защитные очки с боковыми щитками.
- Используйте только рекомендуемые насадки-аппликаторы.
- Насадки предназначены только для одноразового использования.
- Чтобы избежать засорения, между каждым использованием снимайте наконечник и закрывайте люэровскими наконечниками.
- При попадании продукта внутрь, выпейте большое количество воды и обратитесь к врачу. Если продукт попал в дыхательные пути, немедленно обратитесь к врачу.

Пошаговые инструкции

Препарат - шприц объемом 1,2 мл

1. Снимите люэровский наконечник.
2. Надежно прикрепите рекомендуемую насадку.
3. Проверьте текучесть геля перед внутриворотным внесением. При обнаружении сопротивления замените насадку и повторите проверку.
4. Перед нанесением проверьте цвет и консистенцию продукта. Первоначально из шприца может выделиться небольшое количество прозрачной жидкости (это нормально).

Приготовление - шприц IndiSpense

1. Снимите люэровский наконечник со шприца IndiSpense.
2. Присоедините шприц объемом 1,2 мл к наружной резьбе шприца IndiSpense.
3. Нажмите на поршень дозатора, направляя поршень шприца объемом 1,2 мл до желаемого наполнения.
4. Разделите шприцы и снова закройте шприц-дозатор люэровским наконечником.
5. Надежно прикрепите рабочий наконечник к шприцу объемом 1,2 мл.

Использование - Прямое размещение

1. Изолируйте зуб (зубы).
2. Промойте и высушите подготовленный участок.
3. Нанесите травительный раствор на препарированную эмаль (бором, диском или воздушно-абразивным методом) и дентин на 15 секунд; или нанесите протравочный гель на неотпрепарированную эмаль на 30 секунд (например, ортодонтические брекеты или фиссурные герметики).
4. Тщательно промойте и высушите до уровня, указанного в инструкциях производителя адгезива.

ПРИМЕЧАНИЕ: При нанесении антибактериального раствора Consepsis™ (CHX) нанесите и высушите до уровня, указанного в инструкциях производителя адгезива.

Применение - Очистка фосфорной кислотой перед реставрационными процедурами

1. После использования фтороводородной кислоты нанесите протравочный гель на внутреннюю поверхность фарфорового венира или коронки на 5 секунд.
2. Тщательно промойте.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании метода полного травления нет необходимости выполнять этот шаг до требуемого времени травления.

Обработка

Чтобы избежать перекрестного загрязнения, протирайте шприц не агрессивным дезинфицирующим средством между использованиями и используйте одноразовый защитный чехол для шприцев. Если защитный чехол не используется, шприц следует использовать как одноразовый.

Хранение и утилизация

Храните в соответствии с этикеткой на внешней упаковке.
Утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами, руководящими принципами и предписаниями.

Дополнительная информация

Сообщите о любом серьезном инциденте производителю и компетентному органу.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200