

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
набора полирующих кальцинирующих паст для естественных зубов  
**"ПОЛИДЕНТ"**  
по ТУ 9391-030-45814830-98

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Набор полирующих кальцинирующих паст для естественных зубов «Полидент» (далее по тексту – пасты «Полидент»)

Пасты «Полидент» предназначены:

Полидент № 1 – для размягчения и удаления зубного камня без повреждения эмали.

Полидент № 2 – для удаления мягкого налета, пелликул и обработки эмали перед реставрацией зубов, герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также для профилактики кариеса методом снятия зубных отложений.

Полидент № 3 – для отбеливания, реминерализации и фторирования зубной эмали.

Пасты «Полидент» предназначены для применения в условиях медицинского учреждения.

**СОСТАВ И СВОЙСТВА**

Пасты «Полидент» обладают полирующими свойствами, фторируют (пасты с фтором) и защищают эмаль зубов, создают приятное ощущение свежести в полости рта. Пасты «Полидент» содержат мелкодисперсный абразив, кальциевые соли антисептические, фторирующие, и вкусовые добавки, пастообразователь и наполнитель.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

**ВНИМАНИЕ:**

*Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

«Полидент» № 1 рекомендуется для лечения дисколорита твердых тканей зуба, для курильщиков и больных литиазом. Паста «Полидент» № 1 характеризуется совокупностью химического и механического воздействия на твердые зубные отложения. Кислотная составляющая пасты размягчает твердые отложения, абразив счищает их с поверхности зубов при обработке, а антисептик предохраняет от повторного отложения зубного налета.

*Способ применения.* Нанести необходимое количество пасты строго на зубные отложения (избегая попадания на десну), оставить на 2-4 минуты. Затем обработать зуб циркулярной щеткой или резиновой насадкой на средней скорости при среднем давлении. Смыть пасту с поверхности зуба и щетки водой. Рекомендовать пациенту использовать зубные пасты, содержащие фтор.

Паста «Полидент» № 2 (без фтора) содержит абразив, позволяющий производить очистку эмали и фиссур с минимальным риском повреждения их поверхности. «Полидент» № 2 содержит пастообразователь, придающий пасте пластичную консистенцию, удобную в работе. Гидрофильный пастообразователь позволяет легко удалять пасту водой с поверхности зубов.

*Способ применения.* Необходимое количество пасты нанести на циркулярную щетку или любой чистящий инструмент. На средней скорости при среднем давлении обработать поверхность зуба. Для очистки открытой фиссуры тщательно обработать окклюзионную поверхность зуба, стенки и дно фиссуры. Очищенные поверхности необходимо промыть водой и высушить.

Отбеливающие свойства пасты «Полидент» № 3 определяет перекись карбамида - наиболее эффективный отбеливатель, щадящий эмаль. Абразив легко снимает мягкий налет; фториды и производные фосфора реминерализируют и защищают эмаль зубов.

*Способ применения.* Нанести необходимое количество пасты на зуб, оставить на 2-3 минуты. Затем обработать зуб циркулярной щеткой на средней скорости при среднем давлении. Смыть пасту с поверхности зуба и щетки водой. Курс отбеливания составляют 3-5 процедур с равными временными промежутками (желательно через день). Приостановка отбеливания на несколько суток не снижает результат при последующем восстановлении



процедур. Пациенту рекомендуется в процессе отбеливания и в течение 10 дней после него не употреблять окрашивающие зубы продукты (чай, кофе и т.п.).

### **ФОРМА ВЫПУСКА**

*Выпускаются отдельно:*

Паста № 1, № 2, №3 (шприц)	- 5 мл
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка или	- 1 шт.
Паста № 1, № 2 (туба)	- 90 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

*Выпускаются набором:*

Паста № 1, № 2 (банка)	- 40 г
Паста № 3 (банка)	- 30 г
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск паст «Полидент» другой комплектности.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

Пасты «Полидент» № 1 и «Полидент» № 2 хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +25°C.

Пасту «Полидент» № 3 хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5°C до +10°C.

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30°C до +30°C.

Срок годности - 3 года.

### **ВНИМАНИЕ:**

*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.*

*Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.*

*Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.*

*Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.*

*В случаях аллергических реакций у особенно чувствительных пациентов материал следует удалить и отказаться от дальнейшего его применения.*

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Остатки паст «Полидент» и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03037 от 19.12.2017г.