

Торговое название: Everest I, Everest I powder, Everest I liquid.

Описание продукта:

Стоматологический цемент для фиксации коронок, протезов, вкладок и накладок

Показания к применению:

Фиксация вкладок, накладок, коронок, мостов, штифтов и штифтов на металлической основе.

Состав:

Цемент стоматологический стеклоиономерный Everest I порошок (powder) :

Специально подготовленное иономерное стекло

Цемент стоматологический стеклоиономерный Everest I жидкость (liquid) :

Дистиллированная вода, Полиакриловая кислота.

Свойства, характеристики:

Вариант исполнения	Максимальная толщина пленки, мкм	Чистое время твердения, мин		Минимальная прочность при сжатии, МПа	Максимальная кислотная эрозия, мм/ч
		мин	макс		
<i>Цемент стоматологический стеклоиономерный Everest I</i>	25	2,5	8	50	0.17

Способ применения:

Подготовка к замешиванию

- а) Для достижения удобной консистенции следует соблюдать соотношение: на 1 мерную ложку порошка — 5-6 капель жидкости
- б) Для более точной дозировки перед каждым взятием порошка встряхивайте бутылочку, слегка постукивая ею о ладонь. Не трясите и не переворачивайте.
- в) Бутылочку с жидкостью держите вертикально и выдавливайте жидкость осторожно.
- д) Бутылочку плотно закройте сразу же после использования.

Замешивание:

Поместите необходимое количество порошка и жидкости на блокнот для замешивания. Добавьте сразу же весь порошок к жидкости, и быстро замешайте пластиковым шпателем в течение 20 секунд.

Для замешивания больших количеств материала разделите порошок на две равные части.

Замешивайте первую часть со всей жидкостью в течение 5 секунд. Затем добавьте оставшийся порошок и тщательно замешайте весь материал в течение еще 15 секунд (общее время - 20 секунд)

Техника фиксации:

- а) Покройте внутреннюю поверхность фиксируемой конструкции достаточным слоем цемента и сразу приступайте к фиксации. Рабочее время составляет 2 мин от начала замешивания при 23 ° С. Повышение температуры сокращает рабочее время.
- б) Оказывайте умеренное давление.
- в) Начинайте удалять избыток цемента на резиноподобной стадии отверждения
- д) Финишная обработка может быть произведена через 5 минут после начало фиксации.

Внимание:

1. В случае контакта с тканями полости рта и кожей, немедленно удалите губкой или ватным тампоном, смоченным в спирте. Промойте водой. Чтобы избежать попадания материала на слизистые и кожу, используйте раббердам.
2. В случае попадания в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу.
3. **Не смешивайте** порошок или жидкость с компонентами других стеклоиономерных цементов.
4. Этот материал не может использоваться в качестве пломбирочного цемента или для восстановления культи зуба.

Комплектация:

Цемент стоматологический стеклоиономерный Everest I (порошок/жидкость):

1 шт x 15 г порошка/1 шт x 30 г порошка
1 шт x 10 мл жидкости/ 1 шт x 20 мл жидкости
1шт ложка
1 шт блокнот для замешивания
1 шт x инструкция по применению

Цемент стоматологический стеклоиономерный Everest I (порошок):

1 шт x 30 г порошка
1шт ложка
1 шт x инструкция по применению

Цемент стоматологический стеклоиономерный Everest I (жидкость):

1 шт x 20 мл жидкости
1 шт x инструкция по применению

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов медицинского изделия;
Применение медицинского изделия в качестве материала для прямого покрытия пульпы
Лечение пациентов, у которых в прошлом были аллергические реакции на стеклоиономерные цементы.

Меры предосторожности:

Перед использованием наденьте подходящую защитную одежду и перчатки.
В случае попадания в глаза или на кожу немедленно удалить материал и промыть водой.
При возникновении аллергических реакций у особо чувствительных пациентов следует удалить материал и отказаться от его дальнейшего применения.
Не добавляйте материал с большим избытком, чтобы избежать раздражения пульпы.

Условия хранения:

Хранить и транспортировать при температуре от 4°C: до 25°C и относительной влажности не выше 85 %.

Срок годности :

3 года с даты изготовления

Утилизация:

Изделие не относится к опасным отходам. Утилизировать в соответствии с общепринятой медицинской практикой и применимыми местными, государственными и федеральными законами и нормативными актами. Класс опасности для медицинских отходов с учетом спецификации морфологического состава (в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами Российской Федерации 2.1.7.2790-10): Класс А

Производитель:

Queen Dental GmbH
Neue Straße 67, 99846 Seebach, Germany
Нэо штрассе 67, 99846 Зеебах, Германия
Телефон: +49 36929 139999
E-mail: sales@queendental.de