

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набора гелей для отбеливания, реминерализации
и фторирования эмали зубов
«БЕЛАГЕЛЬ®»
по ТУ 9391-050-45814830-2004
(паста отбеливающая «БЕЛАГЕЛЬ®»-О ЭНДО)

НАЗНАЧЕНИЕ

Область применения – стоматология. Для профессионального применения в условиях лечебно-профилактических учреждений.

Набор гелей для отбеливания, реминерализации и фторирования эмали зубов «Белгель» (-О Эндо) (далее по тексту – паста «Белгель»-О Эндо) предназначена для внутриканального и внутрикоронкового отбеливания депульпированных зубов.

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Паста «Белгель»-О Эндо представляет собой пасту на основе наиболее щадящего отбеливателя перекиси карбамида – 60% (эквивалентно 22% перекиси водорода). Перекись карбамида – окисляющее вещество, способное в присутствии физиологических жидкостей образовывать активный кислород, под действием которого, происходит расщепление органических веществ, окрашивающих ткани зуба.

Паста «Белгель»-О Эндо обладает бактерицидным действием.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ: *Материал, хранившийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре в течение не менее 1 часа.*

1. Перед началом отбеливания очистить зубы от налета, убедиться в том, что зуб депульпирован и эндодонтическое лечение было проведено успешно.

2. При помощи коффердама изолировать десну от повреждения отбеливающей пастой.

3. Удалить пломбирочные материалы из полости зуба и пульпарной камеры. Удалить гуттаперчу или другой материал до поддесневого уровня. Убедиться в том, что каналы герметично запломбированы. На пломбирочный материал, остающийся в канале, положить стеклоиономерный или карбоксилатный цемент.

4. Нанести протравочный гель в полость зуба на 10-15 сек. Затем промыть и высушить.

5. Внести пасту «Белгель»-О Эндо в пульпарную камеру таким образом, чтобы она контактировала с вестибулярной стороной зуба. Покрыть ватным шариком и запломбировать полость временным безэвгенольным пломбирочным материалом. Через 3-4 дня осмотреть пациента. Если достигнут нужный отбеливающий эффект, запломбировать полость зуба, если нет, то процедуру отбеливания повторить. Рекомендуется проводить эту процедуру в несколько посещений, чтобы не превысить нужной степени отбеливания.

ВНИМАНИЕ: Паста «Белгель»-О Эндо обладает высокой концентрацией перекиси карбамида, поэтому избегать любого контакта ее со слизистой полости рта.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (шприц)	- 1,5 г
Игла изогнутая	- 3 шт.
Инструкция по применению	- 1 шт.
Картонная упаковка	- 1 шт.

Допускается выпуск пасты «Белгель»-О Эндо другой комплектности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом темном месте при температуре **от +5°C до +10°C.**

Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре **от -30°C до +30°C.**

Срок годности - **2 года.**