

## Рекомендация по применению

### Гель с содержанием ионного серебра для химического расширения корневых каналов зубов "Дилатон-гель" по ТУ 9391-038-10614163-2001

РУ № ФСР 2011/10713 от 07.05.2018 г.

#### Назначение

"Дилатон-гель" является медицинским изделием кратковременного применения, выпускается в нестерильной форме для профессионального использования врачами - стоматологами, предназначен для химического расширения корневых каналов зубов верхнего и нижнего ряда и выявления устья каналов, обладает антисептическим действием.

#### Основные свойства и технические характеристики

«Дилатон-гель» представляет собой гель зелёного цвета, содержит в своём составе 17 % трилона Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), активное серебро в ионной форме и водорастворимый гелеобразователь. Трилон Б обеспечивает размягчение дентина корневого канала и растворение смазанного слоя, увеличивает дентинную проницаемость, что улучшает адаптацию силера к стенкам канала. Гелеобразная форма удобна в применении, служит хорошей смазкой для эндодонтического инструмента, водорастворимая основа позволяет легко вымывать гель из канала. Активное серебро, в ионной форме обеспечивает бактерицидный эффект материала «Дилатон-гель».

#### Противопоказания к применению

Противопоказаний не выявлено.

#### Способ применения

Полость зуба вскрыть обычным способом, очистить от содержимого пульповую камеру. Ввести небольшое количество «Дилатон-гель» в корневой канал при помощи эндодонтического инструмента. Оставить на 1-2 минуты. Произвести механическое расширение канала. Чередовать механическое и химическое воздействие до получения необходимого результата. Обработать канал 3% раствором гипохлорита натрия, который растворяет органическую основу дентина. После расширения корневой канал тщательно промыть водой.

#### Форма выпуска

Шприц с гелем массой 5 г закрытый колпачком — 1 шт; Рекомендация по применению — 1 шт  
Насадка на шприц (игла) — 5 шт.

#### Условия хранения и транспортирования

Хранить при температуре от + 4°C до + 25°C

#### Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие «Дилатон-гель» требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

#### Техническое обслуживание и ремонт

Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

#### Утилизация отходов

Отходы после использования «Дилатон-гель» в виде остатков геля, пустой тары утилизируются согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А.

**Срок годности:** 3 года

#### Изготовитель

ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.  
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru