

# ADHESOR™ FINE

## Цинк-фосфатный цемент

### Характеристика:

Модифицированный цинкфосфатный цемент, тонкая зернистость которого позволяет его применение очень тонким слоем (25 микронов).

### Показания:

- 1) Цементирование коронок, мостов, фиксирующих шин и т.п. Создание тонкой плёнки (25 микронов) позволяет проводить цементирование точных фиксирующих операций.
- 2) Подкладочный материал под амальгамные и композитные пломбы.
- 3) Материал для временных пломб максимально на 6 месяцев.

### Противопоказания:

Материал не применяется в случае известной повышенной чувствительности по отношению к некоторым его составным частям.

### Побочные эффекты:

При применении цемента в непосредственной близости пульпы необходимо покрыть дентин тонким слоем препарата из гидроокиси кальция.

### Обработка (предназначена для ручного замешивания):

При замешивании порошок добавляется к жидкости небольшими дозами. Благодаря этому предотвращается образование на цементе неровностей.

### Рекомендуемое соотношение при замешивании:

#### а) Фиксация:

#### Соотношение при замешивании:

Весовое: 1,4г порошка на 0,5мл жидкости.

Объёмное: 2 мерных ложки порошка на 4-5 капель жидкости.

**Время замешивания:** 60-90 секунд.

**Время обработки:** 3-4 минуты (с начала замешивания).

**Время затвердевания:** 6-8 минут (с начала замешивания).

#### б) Подкладки и пломбы:

#### Соотношение при замешивании:

Весовое: 2,3г порошка на 0,5мл жидкости.

Объёмное: 2 мерных ложки порошка на 2-3 капли жидкости.

**Время замешивания:** 75-90 секунд.

**Время обработки:** 2,5-3 минуты.

**Время затвердевания:** 5-6 минуты.

**Предупреждение:**

Порошок: H410 Чрезвычайно токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями. P273 Избегайте попадания в окружающую среду.  
Жидкость: H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. P302+P352  
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P280  
Пользуйтесь защитными перчатками/  
защитной одеждой/защитными очками/защитным щитком для лица.

**Хранение:**

В сухом и тёмном месте при температуре 5-25°C в хорошо закрытой упаковке.

**Срок годности:**

5 лет.

**Упаковка:**

80г порошка + 55г жидкости.

**Цветовые оттенки:**

№1 - белый.

№2 - жёлто-белый.