

# Кальцикур (Calcicur)

## Инструкция по применению

ЕС Медицинское изделие

Разрешен к применению на территории № ФС 2011/09580

### Описание материала:

**Кальцикур** – это рентгеноконтрастная, готовая к применению паста на основе гидроокиси кальция на водной основ с показателем pH >12,5.

### Показания к применению:

- Непрямое покрытие при лечении глубокого кариеса
- Прямое покрытие при вскрытии пульпы или пульпотомии
- Покрытие полостей для защиты от кислотного воздействия при травлении
- Для временного пломбирования корневых каналов

### Противопоказания:

**Кальцикур** противопоказан пациентам, чувствительно реагирующим или имеющим аллергию на химические компоненты данного продукта.

### Целевая группа пациентов:

**Кальцикур** разрешен к применению у всех пациентов без ограничений по полу и возрасту.

### Характеристики материала:

Характеристики материала соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям данного целевого назначения, а также требованиям стандартов, распространяющихся на данное изделие.

### Пользователь:

**Кальцикур** должен использоваться профессионально подготовленным в области стоматологии специалистом.

### Применение:

После очистки и высушивания полости **Кальцикур** наносится тонкими слоями до получения желаемой толщины. Каждый слой оставляется для кратковременного просушивания или тщательно просушивается с применением потока воздуха.

Не наносить пасту на края полости. В заключение наложить прокладку и пломбу.

При пломбировании корневого канала после его подготовки и очистки (напр., перекись водорода 3 % и раствор гипохлорита натрия) пасту внести с помощью имеющейся в наборе канюли или каналонаполнителя, а затем транспортировать ее каналонаполнителем в апикальном направлении. Избегать избыточного выведения материала за пределы апекса и образования воздушных пузырьков, затем провести пломбирование.

Провести рентгенологический контроль временной корневой пломбы. При длительном нахождении временной корневой пломбы в корневом канале (6 - 8 месяцев) ее необходимо обновить.

**Кальцикур** может применяться для временного пломбирования корневых каналов в зубах, как с завершенным, так и с незавершенным ростом корня.

Установленная аппликационная канюля предназначена только для однократного применения. После применения ее следует снять, а шприц плотно закрыть оригинальным колпачком. Чтобы защитить шприц от контаминации вследствие контакта с биологическими жидкостями организма, грязными руками или тканями полости рта, рекомендуется использовать защитный барьер.

**Указания, меры предосторожности:**

- В случае ненадлежащего хранения паста может высохнуть или разделиться на фракции.
- Гидроокись кальция действует прижигающе на кожу и слизистые оболочки, следует избегать попадания в глаза! При случайном контакте тщательно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу.
- Поверхности твердых тканей зуба, адгезивно связывающиеся со стоматологическими материалами, нельзя покрывать гидроокисью кальция!
- **Кальцикур** не накладывается толстыми слоями, не применяется при наличии остатков кариозного дентина или в качестве постоянного пломбировочного или фиксирующего материала.
- Наши указания и/или рекомендации не освобождают Вас от проверки поставляемых нами препаратов на их пригодность к использованию в соответствующих целях.

**Состав (в порядке уменьшения содержания):**

Вода, гидроокись кальция, сульфат бария, гидроксиэтилцеллюлоза

**Указания по хранению и применению:**

Отвердевшую пасту больше не использовать. Хранить при температуре от 15 °С до 23 °С. Не использовать после истечения срока годности.

**Утилизация:**

Материал необходимо утилизировать в соответствии с местными официальными предписаниями.

**Обязательное извещение:**

Обо всех серьезных побочных происшествиях, таких как смерть, серьезное ухудшение состояния здоровья пациента, пользователя или других лиц в течение длительного или короткого периода времени, а также о серьезной угрозе общественному здоровью, которые произошли или могли бы произойти в связи с применением **Кальцикур**, следует сообщать в компанию VOCO GmbH и в компетентные органы.

**Примечание:**

Краткие отчеты о безопасности и клиническом применении **Кальцикур** хранятся в Европейской базе данных о медицинских изделиях (EUDAMED – <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>). Подробную информацию читайте по ссылке [www.voco.dental](http://www.voco.dental).