



VILLACRYL STC



ОПИСАНИЕ

Villacryl STC — это самоотвердеющий акриловый материал, предназначен для изготовления временных коронок и мостов, а также для временных починок коронок и мостов, облицованных акрилом. Материал в виде порошка и жидкости. Предварительное формирование коронки и отверждение материала происходит непосредственно в ротовой полости пациента.

- Максимальная температура отверждения в ротовой полости пациента составляет всего лишь 37°C,
- Прост в употреблении в кабинете стоматолога,
- Эстетичные цветовые оттенки,
- Низкая температура самоотверждения,
- Короткое время самоотверждения,
- Хорошая переносимость пациентами,
- Не содержит тяжелых металлов,
- Биологически нейтральный.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические данные

Пропорция смешивания	2 г порошка / 1,0 мл (1,0 г) жидкости
Время приготовления теста	30 сек
Время пригодности теста к использованию	90 сек
Время отверждения во рту пациента	4 мин.
Время полимеризации	15 мин. – 50-65°C с добавлением отвердителя 2 г / 200 мл воды
Максимальная температура во время полимеризации в ротовой полости	37°C

Цвета

(оптимально приближены к цветам VITA® A-1, A-3, A-4)

- 1 (A-1)
- 2 (A-2)
- 3 (A-3)

Упаковки

Наборы

V200Z05 порошок 3 x 20 г, жидкость 40 мл, отвердитель 40 г