

Инструкция по применению

Жидкость стоматологическая для антисептической обработки полости рта «Дентасептин» по ТУ 391-9017-10614163-2012

РУ №ФСР 2012/13852 от 07.09.2012

Назначение

Для антисептической обработки полости рта пациента перед стоматологическим приемом, перед снятием слепков, до и после хирургического вмешательства.

Способ применения

Ополаскиватель для полости рта применять без разбавления в небольших количествах - по 20-25 мл., длительность ополаскивания- 30 секунд. Внимание! Не глотать, не рекомендуется детям до 6 лет без специального предписания стоматолога.

Побочные действия

Обладает хорошей переносимостью. Не вызывает общих и местных аллергических реакций.

Условия хранения

Хранить при температуре от +4°C до +25°C в темном месте.

Утилизация отходов:

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 класс А

Срок годности: 18 месяцев.

Изготовитель

ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru